

# MANUEL RAPIDE AMPLIVOX® 170

*(vous êtes évidemment libre de consulter le manuel complet fourni avec l'appareil)*

1. **Connectez tous les périphériques** nécessaires sur l'appareil :
  - 1.1 alimentation + 1.2 casque (rouge/bleu) + 1.3 témoin patient (noir) + 1.5 imprimante si achetée en option
2. **Pour allumer l'appareil** : appui prolongé sur bouton arrière correspondant à « On » (attention ce n'est pas parce que la diode « POWER » est verte que l'appareil est allumé ; c'est juste qu'il y a du courant !)
3. **Pour envoyer le son manuellement**, utilisez simplement les touches en façade LEFT (gauche), RIGHT (droite), SIGNAL (intensité), FREQUENCY (fréquence),
4. **Pour envoyer le son en AUTOMATIQUE** appuyez sur la touche AUTO et le test démarre tout seul (avant, prenez le temps de donner les instructions au patient : « soyez très concentré, et dès que vous entendez un son dans les écouteurs, appuyez sur le bouton et relâchez aussitôt »)
5. **Quand le test est terminé** l'écran indique « TEST FINISHED » ; « touche MENU maintenue + RESULTS » pour voir tous les résultats sans avoir à défiler fréquence par fréquence (← ou →).
6. **Pour imprimer** sur l'imprimante connectée (Able AP1300), appuyez sur la touche PRINT et répondez YES à la question « Is printer ready » à condition bien sûr que l'imprimante soit connectée et allumée.
7. **Attention pour éteindre l'appareil** ne débranchez pas le cordon secteur (vous endommagerez le système) ; faites un appui maintenu sur MENU et répondez YES à la question « Switch Off ? » (comme la fonction Démarrer -> Arrêter sur un ordinateur sous Windows)
8. **A noter 1** : il est possible de mettre 12 tests en mémoire
9. **A noter 2** : il est possible de transférer via la sortie USB vers un ordinateur PC et imprimer en A4 (logiciel AmpliSuite téléchargeable gratuitement / cordon USB non fourni)