

OPTOVIST^{II}

Mode d'emploi du test
automatique V1

Liste des modifications

Modification			Chapitres modifiés	Description de la modification	Auteur
N°	Date	Version			
1	28.06.2018	1.0	tout	Création	PH

Résumé du contenu

1	Informations complémentaires	1
1.1	Accessoires compris	1
1.2	Introduction	1
1.3	Préparation	1
1.3.1	Connexion du casque d'écoute.....	1
1.3.2	Connexion du bouton-poussoir de réponse du sujet	1
2	Sélectionner l'examen dans Vistec App	2
3	Démarrer le test	3

1 Informations complémentaires

1.1 Accessoires compris

- Bouton-poussoir de réponse du sujet
- Casque d'écoute

1.2 Introduction


Pour des informations générales sur l'instrument et le logiciel, veuillez lire le manuel "Optovist II". Vous le trouverez également en format PDF dans Vistec App sous: Paramètres → Aide → Visiométrie.

Le dépistage visuel à commande vocale vous permet d'effectuer les tests automatiquement.

1.3 Préparation

1.3.1 Connexion du casque d'écoute

Vous pouvez connecter le casque à l'USB aussi bien par AUX que par Bluetooth.

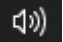Pour la connexion via un câble AUX, connectez le casque à la sortie AUX de votre ordinateur. Sélectionnez ensuite les écouteurs comme support de sortie audio via l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches. 

La connexion des écouteurs par Bluetooth s'effectue en allumant les écouteurs. Allez ensuite dans le gestionnaire de tâches de votre ordinateur et ajoutez les écouteurs comme nouveau périphérique Bluetooth.

1.3.2 Connexion du bouton-poussoir de réponse du sujet


Pour que le test visuel automatique puisse démarrer dans le logiciel, vous devez d'abord connecter le bouton de réponse du sujet à votre ordinateur. Nous recommandons de le connecter directement à l'ordinateur ou à un hub USB actif.

2 Sélectionner l'examen dans Vistec App

Pour sélectionner l'un des autotests dans l'application Vistec, lancez l'application Vistec. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez ensuite créer ou sélectionner un sujet comme d'habitude.

Vous verrez ensuite l'aperçu de tous les tests manuels sur la gauche et de tous les tests automatiques sur la droite. Les tests automatiques sont en outre marqués par "Autotest". Sélectionnez le test souhaité.

Nouvel examen




<p>Tests en mode manuel</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Tests de base (6 tests)1.2. Tests de base + Champ visuel binoculaire1.3. Tests de base + Couleurs Ishihara1.4. Tests de base + Champ visuel + Couleurs1.5. Base + Champ visuel + Couleurs + Rel + Contraste + Ebl2.1. Champ visuel binoculaire2.2. Champ visuel monoculaire G-D3. Contraste et Eblouissement4.1. Hypermétropie4.2. Astigmatisme5. Reliefs6. Amsler (DMLA)7.1. Travail sur écran Chiffres7.2. Travail sur écran Lettres7.3. Travail sur écran Landolt8. Police Nationale8.0 Vision crépusculaire	<p>Tests en mode automatique</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Tests de base (6 tests) - (Autotest)1.2. Tests de base + Champ visuel binoculaire (Autotest)1.3. Tests de base + Couleurs Ishihara - (Autotest)1.4. Tests de base + Champ visuel + Couleurs (Autotest)2.1. Champ visuel binoculaire (Autotest)2.2. Champ visuel monoculaire G-D (Autotest)4.1. Hypermétropie - (Autotest)4.2. Astigmatisme - (Autotest)5. Reliefs - (Autotest)7. Travail sur écran - (Autotest)
---	---

3 Démarrer le test

Pour démarrer le test, demandez au sujet de s'asseoir confortablement et en position verticale devant l'appareil. Si le sujet porte des lunettes, celles-ci doivent être à portée de main. Indiquez ensuite au sujet de prendre le bouton de réponse du sujet dans sa main.

Dans Vistec App, vous pouvez ensuite sélectionner la langue sur le côté gauche.

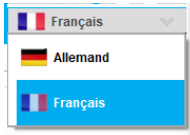

Si vous souhaitez que le test porte à la fois sur la vision sans lunettes et sur la vision avec lunettes, activez le test sans lunettes/avec lunettes - le plus devient alors bleu.



Pour démarrer le test, cliquez sur l'icône de lecture.



Le test se déroule alors automatiquement et se termine par l'instruction du sujet "Merci pour votre coopération".

Vistec AG

Werner-von-Siemens-Str.13, D-82140 Olching

Tel.: +49 81 42/ 44 857-60, Fax: +49 81 42/ 44 857-70

E-Mail: info@vistec-ag.de, Internet: www.vistec-ag.de