



Procédure simplifiée d'installation du logiciel M-Trace PC

Pour utilisation de l'ECG connecté sur PC : ECG-PC EOLYS

Date : 2026/03/24

AVANT d'installer et d'ouvrir l'application puis de vouloir utiliser votre ECG, il faut se rappeler ceci :

- L'ECG-PC Eolys est un émetteur/ récepteur qui reçoit par sa fiche DE15 le signal vital des 12 dérivations du cœur conduites par les accessoires posés sur le patient (câble 10 brins à fiches banane ou boutons pression, adaptateurs type Easyclip, électrodes posées aux emplacements voulus, ceinture ECG pectorale éventuelle).
- Couplé en Bluetooth ou connecté en USB, le boîtier répond au PC qui l'appelle et lui transmet ce signal en un fichier informatique unique que seul son logiciel **M-Trace PC** peut traduire, afficher et exploiter.
- L'ECG-PC Eolys s'alimente avec 2 piles 1.5V type LR06 (fournies au départ). Piles rechargeables à proscrire !
- 1 bouton et 2 diodes > appui court pour allumer & éteindre ; clignote vert : fonctionne ; diode rouge : piles à remplacer.

INSTALLATION **À SUIVRE RIGOREUSEMENT DANS L'ORDRE**

- 1- Logiciel **Visual C++ 2012** si manquant sur le PC (faire « suivant » + « suivant » etc.)
https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist_x86.exe
- 2- Logiciel **M-Trace PC** (faire « suivant » + « suivant » etc.)
https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys_mtracepc-4.79_win10-11.exe
- 3- **N° licence multiposte valide**
A saisir lors de la 1^{ère} ouverture de l'icône depuis le bureau - ne pas juste installer mais bien ouvrir !
KS7E KUUC 84F9 7AJB 5WGI V7BF LL6A

Si vous aviez déjà une version antérieure de M-Trace PC installée sur votre PC (donc s'il s'agit d'une mise à jour), il ne vous sera pas demandé de ressaisir de code licence car il est déjà enregistré dans le registre de Windows.

- 4- Une fois les logiciels installés il faut **JUMELER en BLUETOOTH** votre ECG :

Le PC doit disposer de la fonction Bluetooth  (sinon achetez/utilisez un dongle USB).
Si votre PC a déjà la fonction Bluetooth, alors ne connectez pas le dongle USB fourni !

4.1. Dans M-Trace PC il faut aller dans « **Réglages - Réglages communication ECG-PC EOLYS** ».

- Valider la recherche en Bluetooth (sinon connexion USB) ; passez les messages en les lisant malgré tout.
- Le logiciel peut ne pas détecter l'ECG de suite, appuyez sur « **Chercher à nouveau** » et insistez 1 fois ou 2.
- Une fois l'ECG & son numéro de série sélectionnés, il faut obligatoirement cliquer sur **Test de connexion**.

4.2. Windows est censé faire apparaître un message en bas à droite de l'écran du PC :

« **Ajouter un périphérique ; Approcher pour configurer ...** » => cliquez vite sur ce bouton et validez.

4.3. Si jamais un mot de passe est demandé dans les paramètres Bluetooth Windows => **1234**.

- 5- Il est conseillé de créer raccourci bureau et raccourci rapide du répertoire **export PDF-ECG automatique**.
Le **chemin est déjà pré-réglé** dans le logiciel. Par défaut => C:\M4Medical\M-TracePCBase\PDF-ECG.
Avec des fichiers nommés avec ID_Nom_Date-examen (exemple : 12345MARTIN20260324.pdf).
- 6- Si vous bénéficiez d'une passerelle avec votre logiciel de santé, il faut la régler avec les bons chemins :
Dans **M-Trace PC** => **Réglages – Interface** (input/output) ; à régler selon les instructions de votre éditeur.