


Kit mobile ECG avec ceinture LevMed

Evitez d'utiliser (et d'étirer trop fort) cet accessoire sur les patients à très large thorax pour ne pas rompre la connectique en aluminium sous la moulure


Suivez ces instructions étape par étape :

Après avoir terminé chaque étape, passez à la diapositive suivante.

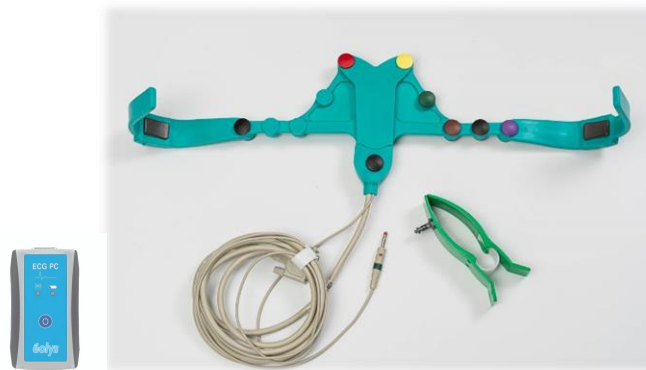


**Ceinture
ECG dédiée**


**Vérifiez que le câble de la ceinture ECG
est connecté à l'appareil ECG.**

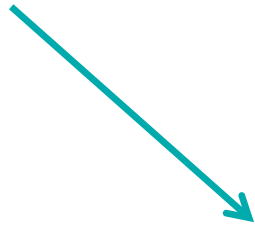

1. Ouvrez la vis de l'électrode à pince verte.
2. Insérez la dérivation à fiche banane.
3. Fermez la vis.

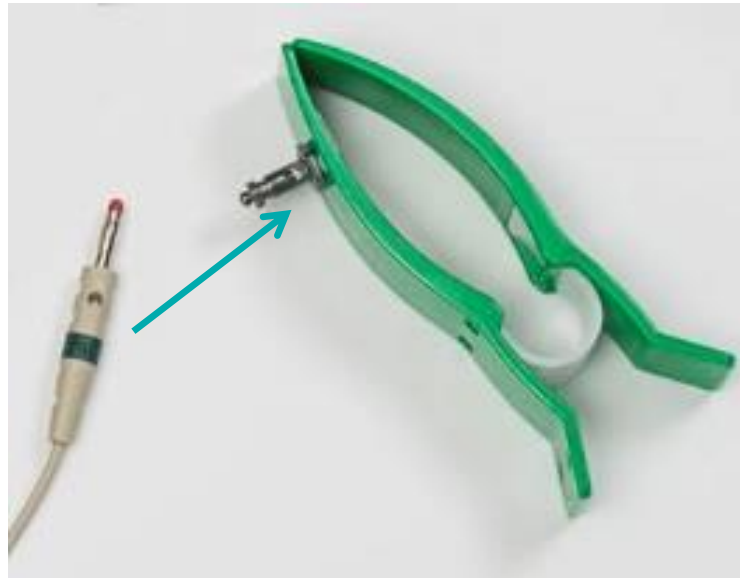


Ouvrez ou retirez la chemise du patient :

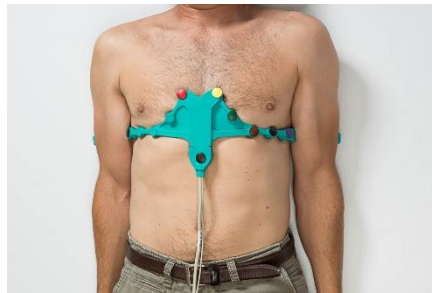

Humidifiez **très abondamment** les points de contact avec du sérum physiologique, de l'alcool ou du gel




(V1 à V6, RA, LA, RL)

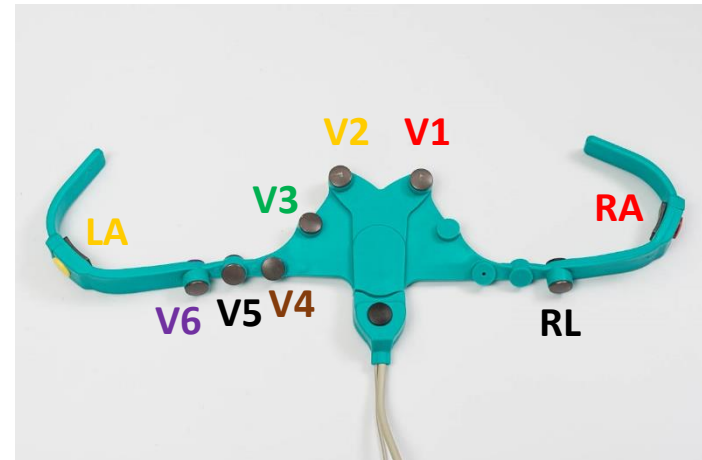


Si nécessaire, inclinez V1 et V2 pour garantir le contact des électrodes avec la poitrine du patient :



**Placez la ceinture sur le torse du patient avec V1
et V2 de façon symétrique des deux côtés du
sternum :**

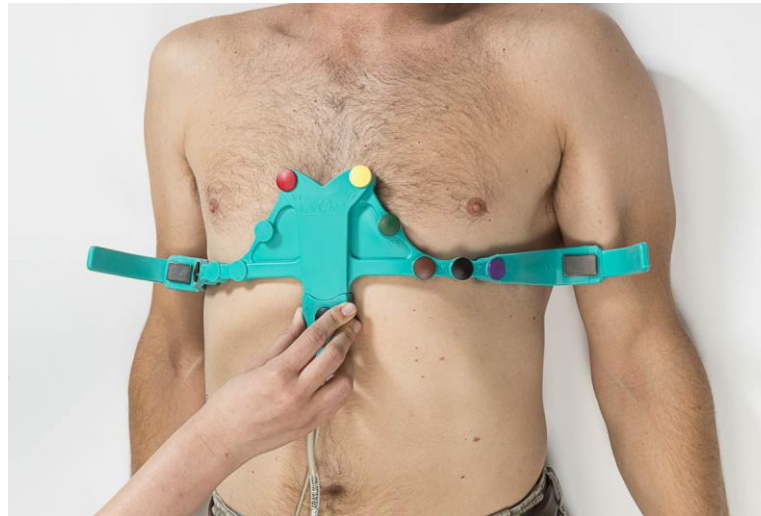


Appliquez la première anse sous le bras à mi-hauteur, entre le coude et l'épaule :

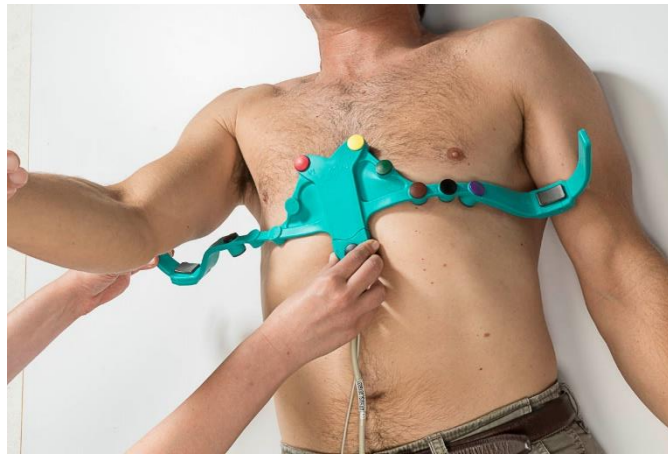

Appliquez la seconde anse sous l'autre bras à mi-hauteur, entre le coude et l'épaule :




**Vérifiez que les électrodes V4, V5 et V6
se trouvent sous la poitrine :**

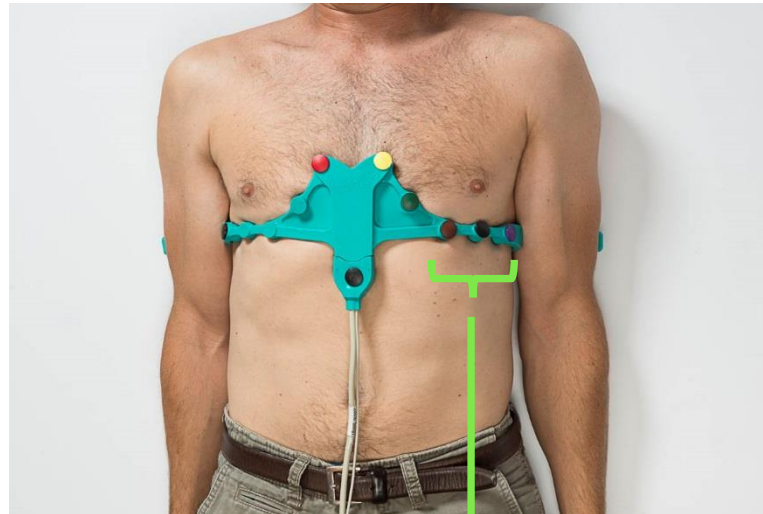

V4, V5, V6


Assurez-vous que les 9 électrodes sont en contact avec la surface cutanée :

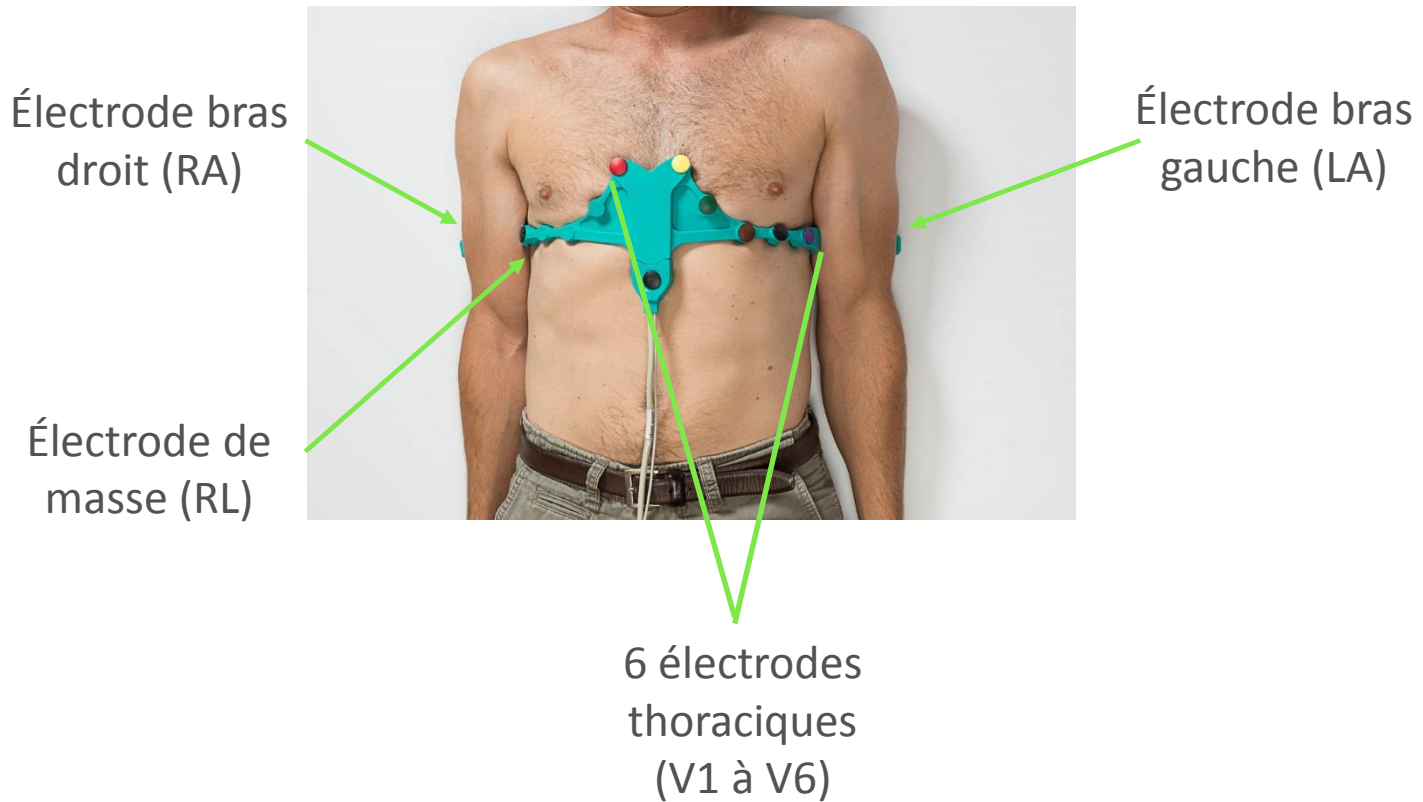

**Humidifiez également
l'électrode à pince verte**




**Appliquez l'électrode à pince verte
sur l'intérieur de la cheville gauche
(ou bas de mollet gauche)**


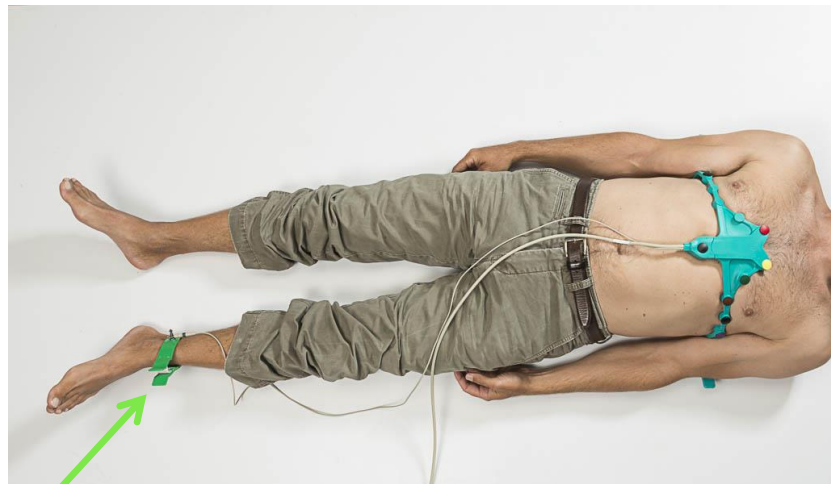


Assurez-vous que le patient est détendu et ne contracte pas ses muscles.

Demandez au patient de ne pas parler ni bouger pendant l'examen.

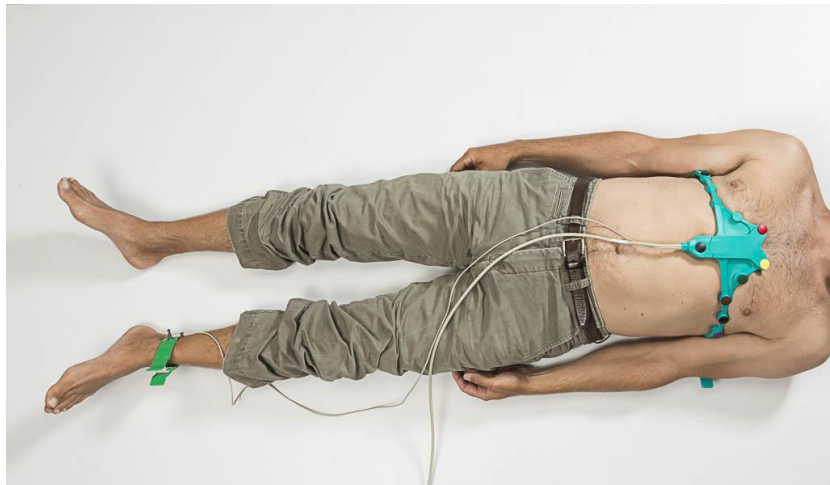

Appuyez sur « Démarrer » sur l'appareil ECG pour lancer l'acquisition ECG.

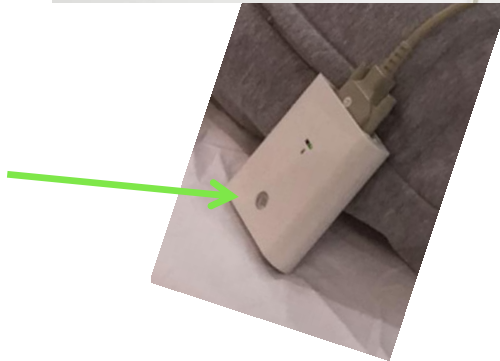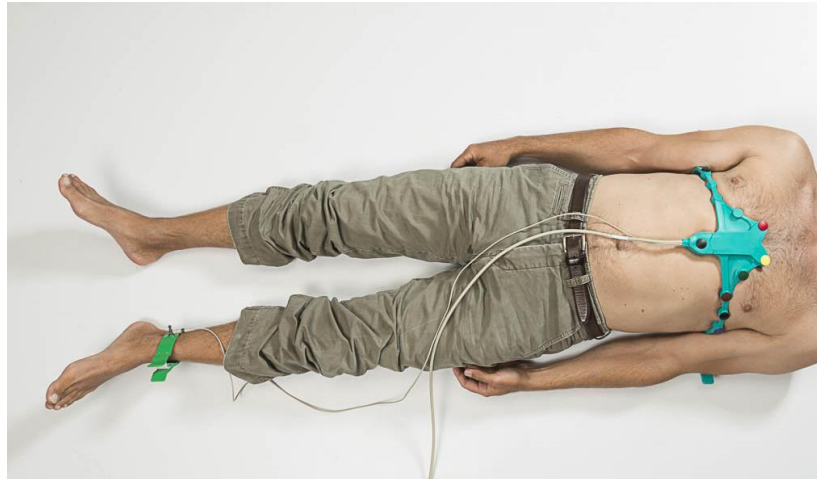

Ouvrez l'application M-Trace PC
et démarrez l'ECG (Nouvel examen).

M-Trace PC Base

Système Patient Impression Réglages Aide

Stockage 1

Nouveau patient Editer/modifier le patient Effacer le patient

Liste de patients

Numéro	Nom de famille	Prénom	Date de n...	Info
852	KETTIN	François	29.03.1971	
12345	KETTIN	Virginie	28.02.1975	
0000032	KHRAN	Bruno	18.09.2000	
0000005	MOREL	Bob	28.11.1970	
365341...	MULLER	CATHERINE	08..1945	
0000019	NARDEL	Pierre	16.06.1979	
381281...	PATIENT-TEST	ALAIN	29.03.1971	
0000039	PINOT	Dominique	27.07.1953	
0000034	PLICRE	Patricia	18.09.1983	
344231...	SCHNEIDER	CHRISTELLE	04..1977	
	SIMULATEUR-ECG		10.01.1976	

Liste d'exams:

Id	Date et heure	Type ...	Status	Longueur:
1	20.04.2011 14:53:08	ECG	ok - A	10 s
2	11.09.2015 09:49:29	ECG	ok - A	10 s
3	11.09.2015 13:55:06	ECG	ok - A	10 s
4	16.09.2015 13:52:47	ECG	ok	10 s
5	23.09.2015 16:16:54	ECG	ok - A	10 s

Effacer l'examen

Copie

Comparaison d'exams

Revoir l'examen

Rechercher:

? ☐ ☒ ☐ ☐

Numéro Taille

Nom de famille Poids

Prénom

Date de naissance Sexe ☐ Féminin ☒ Masculin

Adresse:

Rue

Localité

Dépannage



En cas de bruit (parasite) sur le signal ECG, vérifiez les points suivants :

1. Du liquide ou du gel a été appliqué sur toutes les électrodes.
2. Toutes les électrodes sont en contact direct avec la surface cutanée.
3. Le patient est détendu, ses muscles ne sont pas contractés.

