



Procédure simplifiée d'installation du logiciel M-Trace PC Pour utilisation de l'ECG connecté sur PC : ECG-PC EOLYS

Date : 2026/03/24

AVANT d'installer et d'ouvrir l'application puis de vouloir utiliser votre ECG, il faut se rappeler ceci :

- L'ECG-PC Eolys est un émetteur/ récepteur qui reçoit par sa fiche DE15 le signal vital des 12 dérivations du cœur conduites par les accessoires posés sur le patient (câble 10 brins à fiches banane ou boutons pression, adaptateurs type Easyclip, électrodes posées aux emplacements voulus, ceinture ECG pectorale éventuelle).
- Couplé en Bluetooth ou connecté en USB, le boîtier répond au PC qui l'appelle et lui transmet ce signal en un fichier informatique unique que seul son logiciel **M-Trace PC** peut traduire, afficher et exploiter.
- L'ECG-PC Eolys s'alimente avec 2 piles 1.5V type LR06 (fournies au départ). Piles rechargeables à proscrire !
- 1 bouton et 2 diodes > appui court pour allumer & éteindre ; clignote vert : fonctionne ; diode rouge : piles à remplacer.

INSTALLATION **À SUIVRE RIGOREUSEMENT DANS L'ORDRE**

1- Logiciel **Visual C++ 2012** si manquant sur le PC (faire « suivant » + « suivant » etc.)

https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist_x86.exe

2- Logiciel **M-Trace PC** (faire « suivant » + « suivant » etc.)

https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys_mtracepc-4.79_win10-11.exe


3- **N° licence multiposte valide**

A saisir lors de la 1^{ère} ouverture de l'icône depuis le bureau - ne pas juste installer mais bien ouvrir !

KS7E KUUC 84F9 7AJB 5WGI V7BF LL6A

Si vous aviez déjà une version antérieure de M-Trace PC installée sur votre PC (donc s'il s'agit d'une mise à jour), il ne vous sera pas demandé de ressaisir de code licence car il est déjà enregistré dans le registre de Windows.

4- Une fois les logiciels installés il faut **JUMELER en BLUETOOTH** votre ECG :

Le PC doit disposer de la fonction Bluetooth  (sinon achetez/utilisez un dongle USB).

Si votre PC a déjà la fonction Bluetooth, alors ne connectez pas le dongle USB fourni !

4.1. Dans M-Trace PC il faut aller dans « **Réglages - Réglages communication ECG-PC EOLYS** ».

- Valider la recherche en Bluetooth (sinon connexion USB) ; passez les messages en les lisant malgré tout.
- Le logiciel peut ne pas détecter l'ECG de suite, appuyez sur « **Chercher à nouveau** » et insistez 1 fois ou 2.
- Une fois l'ECG & son numéro de série sélectionnés, il faut obligatoirement cliquer sur **Test de connexion**.

4.2. Windows est censé faire apparaître un message en bas à droite de l'écran du PC :

« **Ajouter un périphérique ; Approcher pour configurer ...** » => cliquez vite sur ce bouton et validez.

4.3. Si jamais un mot de passe est demandé dans les paramètres Bluetooth Windows => **1234**.

5- Il est conseillé de créer raccourci bureau et raccourci rapide du répertoire **export PDF-ECG automatique**.

Le **chemin est déjà pré-réglé** dans le logiciel. Par défaut => C:\M4Medical\M-TracePCBase\PDF-ECG.

Avec des fichiers nommés avec ID_Nom_Date-examen (exemple : 12345MARTIN20260324.pdf).

6- Si vous bénéficiez d'une passerelle avec votre logiciel de santé, il faut la régler avec les bons chemins :

Dans **M-Trace PC** => **Réglages – Interface** (input/output) ; à régler selon les instructions de votre éditeur.



Guide support SAV sur le Bluetooth de PC Vs ECG-PC EOLYS

Date : 2026/03/24

Vous êtes équipé(e) de l'**ECG-PC Eolys** (ECG de repos 100% connecté sur informatique PC).
Et donc aussi de son logiciel associé **M-Trace PC** qui fonctionne sous OS Windows (7/8/10/11).

Voici d'ailleurs quels sont les derniers fichiers d'installation pour bénéficier des dernières mises à jour (disponible gratuitement au 25/3/2026) :

1. **Visual C++ 2012** (indispensable sinon manque des fichiers dll empêchant l'ouverture M-Trace PC)
https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist_x86.exe
2. **M-Trace PC version 4.79** (rappel : code licence multiposte => **KS7E KUUC 84F9 7AJB 5WGI V7BF LL6A**)
https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys_mtracepc-4.79_win10-11.exe

Il existe 2 connexions de l'ECG à votre PC pour des examens ECG : **Bluetooth** (sans fil) et **USB** (filaire) :

- A) Avec les dernières versions de M-Trace PC, la connexion USB est reconnue automatiquement par M-Trace PC qui vous prévient et vous demande de confirmer avant de lancer un examen.
- B) La connexion Bluetooth nécessite un jumelage propre (rappel : mot de passe si demandé => **1234**) entre le PC et l'ECG, via le logiciel M-TracePC.

Une fois le réglage fait efficacement une première fois, il est stocké sur le disque dur :
C:\M4Medical\M-TracePCBase\Bluetooth\bt_devices.dat

Le cas le plus fréquent de problématique que vous pouvez rencontrer avec la connexion à l'ECG : c'est avec le **Bluetooth de votre PC**, pour plein de raisons : pilote/driver Bluetooth obsolète, Bluetooth malencontreusement désactivé par un opérateur sur le PC, manque de mises à jour Windows (obligatoires mais surtout facultatives car ce sont celles qui concernent le plus souvent des pilotes de correction de périphériques comme le Bluetooth, via des pilotes directement ou des mises à jour de driver en général ou de firmware en particulier).

Nous souhaitons vous conseiller **UNE CHOSE A SAVOIR FAIRE EN CAS DE PROBLEME BLUETOOTH** :
(Comprenez que l'ECG ne fait que répondre à l'appel du PC, c'est sur le PC que le jumelage est déréglé).

1. D'abord, allez dans les paramètres du PC et sélectionnez **Bluetooth et appareils**,
2. Ensuite, localisez votre ECG avec « **M_ECG...** » (« ... » étant son numéro de série chiffré)
Sous Windows 11, il est possible que vous ayez à cliquer sur « **Afficher d'autres périphériques** »
3. Puis après cela, supprimez-le purement et simplement
4. Enfin, refaites les opérations de jumelage tel qu'indiqué dans notre guide rapide d'installation