



Procédure simplifiée d'installation du logiciel M-Trace PC Pour utilisation de l'ECG connecté sur PC : ECG-PC EOLYS

Date : 2024/12/05

AVANT d'installer et d'ouvrir l'application puis de vouloir utiliser votre ECG, il faut se rappeler ceci :

- L'**ECG-PC EOLYS** agit comme un émetteur/récepteur, qui reçoit par sa fiche DE15 le signal vital conduit par les accessoires reliés au patient (câble patient + électrodes ou ceinture pectorale).
- Si couplé en Bluetooth ou connecté en USB, le boîtier transmet ce signal en direct au PC qui affiche alors en direct les 12 dérivations du signal ECG, dans le logiciel **M-Trace PC**.
- Votre ECG s'alimente par **2 piles 1.5V type LR06** (fournies). Il est possible d'utiliser des piles rechargeables, mais c'est déconseillé : 1.2V seulement au lieu de 1.5V avec souvent la nécessité de recharger (risque de ne pas être prêt pour un ECG).
- Votre ECG dispose d'1 bouton et 2 diodes ; Un appui court pour allumer ou éteindre. La diode gauche clignote **en vert** quand il fonctionne ; la diode droite s'allume **en rouge** quand le niveau des piles est faible et qu'il faut alors les changer.


INSTALLATION À SUIVRE RIGOREUSEMENT DANS L'ORDRE

- 1- Logiciel **Visual C++ 2012** si manquant sur le PC (faire « suivant » + « suivant » etc.)
https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist_x86.exe (Ctrl + clic pour ouvrir le lien)
- 2- Logiciel **M-Trace PC** (faire « suivant » + « suivant » etc.)
https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys_mtracepc-4.41_win10-11.exe
- 3- **N° licence** multiposte valide (à saisir lors de la 1^{ère} ouverture de l'icône depuis le bureau)
KS7E KUUC 84F9 7AJB 5WGI V7BF LL6A

Note 1 : si vous aviez déjà une version antérieure de M-Trace PC installée sur votre PC, il ne vous sera pas demandé de ressaisir de code licence car il est déjà enregistré dans le registre de Windows.

Note 2 : tous vos réglages antérieurs sont censés ne pas être modifiés (eux aussi enregistrés dans le registre de Windows) ; mais il sera plus prudent de les vérifier à nouveau après la nouvelle install.

- 4- Une fois les logiciels installés il faut **JUMELER en BLUETOOTH** votre ECG :

Le PC doit disposer de la fonction Bluetooth  (sinon achetez/utilisez un dongle USB).

Si votre PC a déjà la fonction Bluetooth, alors ne connectez pas le dongle USB fourni !

4.1. Dans **M-Trace PC** il faut aller dans « **Réglages > Réglages communication ECG-PC EOLYS** ».

4.2. Windows est censé faire apparaître un message en bas à droite de l'écran du PC :

« **Ajouter un périphérique ; Approcher pour configurer ...** » => cliquez vite sur ce bouton et validez.

4.3. Si jamais un mot de passe est demandé dans les paramètres Bluetooth Windows => **1234**.

- 5- Si vous bénéficiez d'une passerelle avec votre logiciel de santé, il faut la régler avec les bons chemins :
Dans **M-Trace PC** => **Réglages – Interface** (input/output)
- 6- Sinon, pensez à programmer le **chemin d'export automatique du rapport PDF** dans le logiciel :
« **Réglages > PDF-Export** » puis « Parcourir » puis Cocher « Créer le fichier PDF automatiquement »

Si malgré ce guide, vous n'y arrivez pas, pas de panique : il vous reste la solution d'appeler nos services

Au **04 37 64 47 50** : demandez un rendez-vous de téléassistance (par TeamViewer ou Microsoft Teams).