



## Procédure simplifiée d'installation du logiciel M-Trace PC Pour utilisation de l'ECG connecté sur PC : ECG-PC EOLYS

Date : 2025/02/12

**AVANT** d'installer et d'ouvrir l'application puis de vouloir utiliser votre ECG, il faut se rappeler ceci :

- L'**ECG-PC EOLYS** agit comme un émetteur/récepteur, il reçoit par sa fiche DE15 le signal vital conduit par les accessoires posés sur le patient (câble 10 brins + adaptateurs éventuels + électrodes ou ceinture pectorale).
- Couplé Bluetooth ou connecté USB, le boîtier transmet ce signal au PC qui affiche les dérivations dans **M-Trace PC**.
- L'**ECG-PC EOLYS** s'alimente par **2 piles 1.5V type LR06** (fournies). Piles rechargeables à proscrire.
- 1 bouton et 2 diodes > appui court pour allumer & éteindre ; clignote vert : fonctionne ; diode rouge : piles à remplacer.

### INSTALLATION À SUIVRE RIGOREUSEMENT DANS L'ORDRE

- 1- Logiciel **Visual C++ 2012** si manquant sur le PC (faire « suivant » + « suivant » etc.)  
[https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist\\_x86.exe](https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/vcredist_x86.exe) (Ctrl + clic pour ouvrir le lien)
- 2- Logiciel **M-Trace PC** (faire « suivant » + « suivant » etc.)  
[https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys\\_mtracepc-4.69\\_win10-11.exe](https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Eolys_mtracepc-4.69_win10-11.exe)
- 3- **N° licence multiposte valide** (à saisir lors de la 1<sup>ère</sup> ouverture de l'icône depuis le bureau)  
**KS7E KUUC 84F9 7AJB 5WGI V7BF LL6A**

*Note 1 : si vous aviez déjà une version antérieure de M-Trace PC installée sur votre PC, il ne vous sera pas demandé de ressaisir de code licence car il est déjà enregistré dans le registre de Windows.*

*Note 2 : tous vos réglages antérieurs sont censés ne pas être modifiés (eux aussi enregistrés dans le registre de Windows) ; mais il sera plus prudent de les vérifier à nouveau après la nouvelle install.*

- 4- Une fois les logiciels installés il faut **JUMELER en BLUETOOTH** votre ECG :  
Le PC doit disposer de la fonction Bluetooth  (sinon achetez/utilisez un dongle USB).  
Si votre PC a déjà la fonction Bluetooth, alors ne connectez pas le dongle USB fourni !  
  
4.1. Dans M-Trace PC il faut aller dans « **Réglages > Réglages communication ECG-PC EOLYS** ».  
4.2. Windows est censé faire apparaître un message en bas à droite de l'écran du PC :  
« **Ajouter un périphérique ; Approcher pour configurer ...** » => cliquez vite sur ce bouton et validez.  
4.3. Si jamais un mot de passe est demandé dans les paramètres Bluetooth Windows => **1234**.
- 5- Si vous bénéficiez d'une passerelle avec votre logiciel de santé, il faut la régler avec les bons chemins :  
Dans **M-Trace PC** => **Réglages – Interface** (input/output)
- 6- Sinon, pensez à programmer le **chemin d'export automatique du rapport PDF** dans le logiciel :  
« **Réglages > PDF-Export** » puis « Parcourir » puis Cocher « Créer le fichier PDF automatiquement »
- 7- Note aux utilisateurs de Windows 11 depuis les mises à jour 24H2 :  
Microsoft a publié début 2025 des mises à jour erratiques qui perturbent la communication Bluetooth entre l'ECG et le PC (traduit par des ralentissements ou des pointillés à l'écran) ; voici un guide à suivre :  
[https://www.eolys.fr/telechargement/Manuels/Manuels\\_utilisateurs/M-TracePC\\_4.69\\_resolution\\_pointilles\\_W11.pdf](https://www.eolys.fr/telechargement/Manuels/Manuels_utilisateurs/M-TracePC_4.69_resolution_pointilles_W11.pdf)

Si malgré ce guide, vous n'y arrivez pas, pas de panique : il vous reste la solution d'appeler nos services  
Au **04 37 64 47 50** : demandez un rendez-vous de téléassistance (par TeamViewer ou Microsoft Teams).