



Procédure d'installation du logiciel Spirometry PC Software Pour utilisation du spiromètre connecté sur PC : Spiro-USB®

Date : 2024/11/11

INSTALLATION À SUIVRE RIGOREUSEMENT DANS L'ORDRE

1- Préambule sur les périphériques

SURTOUT ne connectez PAS le dongle de sécurité USB ni le Spiro-USB sur les ports USB AVANT d'avoir installé drivers et logiciels

2- Installeur du pilote du dongle de sécurité Safenet :

https://www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Sentinel-Protection-Installer_7.6.9.exe

3- Installeur du programme SPCS dernière version :

www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/Spirometry-PC-Software_Setup_2.6.1.2.exe

4- N° licence multiposte à saisir lors de l'installation (remplir tous les champs)

[100 172 705](#)

5- Pilote du Spiro-USB dernière version :

www.eolys.fr/telechargement/Logiciels/MMD_USB_Win10-11_Driver_Setup.exe

6- Manuel complet logiciel Spirometry PC Software

www.eolys.fr/telechargement/Manuels/Manuels_utilisateurs/SPCS_manuel.pdf

Si malgré ce guide, vous n'y arrivez pas, pas de panique : il vous reste la solution d'appeler nos services

Au **04 37 64 47 50** : demandez un rendez-vous de téléassistance (par TeamViewer ou Microsoft Teams).