

# ECG EOLYS® --- Mode d'emploi simplifié

Les étapes indiquées ci-après vous permettront de rapidement et simplement réaliser un examen avec votre appareil ECG eolys et de l'exploiter en édition et/ou en export sur informatique PC.<sup>22&</sup>

**D'abord installez votre patient confortablement et placez sur lui les électrodes reliées aux fiches banane du câble ECG** (usage possible de poires précordiales, pinces membre, électrodes jetables à languette, à pression, ou ceinture pectorale).

**Allumez votre appareil** (le cas échéant branchez le au secteur, **interrupteur de charge sur la face arrière en position (1)** si l'écran vous indique un niveau de batterie trop bas // visuel de batterie vide Vs batterie pleine).

A partir de là, l'usage de l'ECG se fait en 2, 3 ou 5 temps, selon que vous projetiez ou non d'utiliser l'option PC :

## 1- SAISIR LES DONNEES DU PATIENT

- 1.1. Pressez les touches **MENU** => **PATIENT + Enter** => **NOUVEAU + Enter**
- 1.2. Renseignez les informations voulues et utilisez les flèches de direction **↓** et **↑** puis validez avec **OK + Enter**
- 1.3. De retour à l'écran de choix PATIENT / COPIE / REGLAGE, appuyez sur **Esc** (Escape)

## 2- PRATIQUER L'EXAMEN

Appuyez sur **AUTO** pour un test auto, ou sur **START** pour un test manuel (changez le(s) groupe(s) de dérivations avec la touche **I, II.. V6** si vous n'êtes pas en tracé 12 pistes ; et en arrêtant le tracé avec **STOP**). Selon les réglages, le tracé sortira sur l'imprimante en 4\*3, 2\*6, 2\*6+1, ou 12 pistes (MENU -> REGLAGES -> RAPPORT).

**Note** : si vous connectez en USB une imprimante laser A4 de langage PCL5 ou PCL6, sortira un rapport 12 pistes !

## 3- ENREGISTRER L'EXAMEN

- 3.1. Pressez la touche **MENU** puis avec la touche **→** de votre clavier, allez sur **COPIE** et pressez la touche **Enter**.
- 3.2. Déplacez-vous avec la touche **→** sur **MEMOIRE** et appuyez sur Enter.
- 3.3. Choisissez **SAUV.** avec la touche **Enter**. Les données ayant été saisies avant test, l'enregistrement est fini.

## 4- EXPORTER L'EXAMEN SUR UNE CLE USB (< 4 Go)

- 4.1. Avec la touche **→**, allez sur **CLE USB** + pressez la touche **Enter** (si jamais vous avez éteint votre ECG ou que vous êtes revenu à l'écran de départ => **MENU** + **→** + **COPIE** + **Enter** + **→** + **CLE USB** + **Enter**)
- 4.2. Choisissez **EXPORT** avec la touche **Enter** (il faut avoir connecté la clé USB, sinon rien ne se passera).
- 4.3. Choisir ou confirmer le patient et l'examen à exporter sur la clé (vous pouvez profiter d'avoir la clé pour exporter plusieurs tests de plusieurs patients) en utilisant **les touches ↓ et ↑** ainsi que **la touche Enter**.
- 4.4. Nommez chaque fichier pour le retrouver ensuite depuis votre ordinateur, en utilisant **chiffres & lettres** du clavier de l'appareil ainsi que la touche **Enter** pour finaliser.

## 5- RECUPERATION DES EXAMENS DANS LE LOGICIEL M-BASE

- 5.1. Connectez votre clé sur un port USB de votre PC et parcourez son contenu dans le Poste de Travail
- 5.2. La 1<sup>ère</sup> fois, faites un clic droit sur un des fichiers (\*.\*.scp) pour choisir « Ouvrir avec ... » ; parcourez les programmes et choisissez **mbase-ii.exe** sous C:\M4Medical\MBaseII. Le fichier pourra se charger dans le logiciel et les fois suivantes il suffira de double-cliquer sur un fichier pour que le logiciel l'ouvre aussitôt.
- 5.3. Le logiciel M-Base® II intègre automatiquement fiche patient et examen puis affiche l'examen en 12 pistes.
- 5.4. Depuis l'affichage de votre examen, profitez ensuite des fonctions d'analyse ECG, d'impression A4 locale ou réseau, d'export PDF simplifié ou d'envoi par E-mail directement depuis le logiciel.

Pour toute information complémentaire, reportez-vous au manuel complet, ou contactez-nous :