

# ECG EOLYS --- MANUEL SIMPLIFIE

Les étapes indiquées ci-après vous permettront de rapidement et simplement réaliser un examen avec votre appareil ECG éolys et de l'exploiter en édition et/ou en export sur informatique PC.

**Tout d'abord installez votre patient confortablement et placez sur lui les électrodes déjà reliées aux fiches banane du câble ECG** (usage possible de poires, pinces membre, électrodes jetables à languette, patch ou pression, ou une ceinture pectorale).

**Allumez votre appareil** (le cas échéant branchez le au secteur, **interrupteur de charge sur la face arrière en position (1)** si l'écran vous indique un niveau de charge batterie trop bas // visuel de batterie vide Vs batterie pleine).

A partir de là, l'usage de votre ECG se fait en 2, 3 ou 5 temps, selon que vous projetiez ou non d'utiliser l'option informatique :

## 1- SAISIR LES DONNEES DU PATIENT

- Pressez les touches **MENU** => **PATIENT + Enter** => **NOUVEAU + Enter**
- Renseignez les infos à stocker dans l'examen et utilisez les flèches de direction **↓** et **↑** puis validez avec **OK + Enter**
- De retour à l'écran de choix PATIENT / COPIE / REGLAGE, appuyez sur **Esc** (Escape)

## 2- PRATIQUER L'EXAMEN

Appuyez sur la touche **AUTO** pour un test auto, ou sur la touche **START** pour un test manuel (changez le(s) groupe(s) de dérivation avec la touche **I, II.. V6** si vous n'êtes pas en tracé 12 pistes ; et en arrêtant le tracé avec la touche **STOP**). Selon les réglages, le tracé sortira sur l'imprimante en 4\*3, 2\*6, 2\*6+1, ou 12 pistes (MENU -> REGLAGES -> RAPPORT). **A noter** : si vous reliez à la sortie USB de l'appareil une imprimante laser compatible (langage PCL5 ou PCL6), sera édité un rapport A4/12 pistes.

## 3- ENREGISTRER L'EXAMEN

- Pressez la touche **MENU** puis avec la touche **→** de votre clavier, allez sur **COPIE** et pressez la touche **Enter**.
- Déplacez-vous avec la touche **→** sur **MEMOIRE** et appuyez sur Enter.
- Choisissez **SAUV.** avec la touche **Enter**. Les données ayant déjà été saisies avant le test, l'enregistrement est fini.

## 4- EXPORTER L'EXAMEN SUR LA CLE USB M-BASE

- Avec la touche **→**, allez sur **CLE USB** + pressez la touche **Enter** (si jamais vous avez éteint votre appareil ou que vous êtes revenu à l'écran de départ => **MENU** + **→** + **COPIE** + **Enter** + **→** + **CLE USB** + **Enter**)
- Choisissez **EXPORT** avec la touche **Enter** (il faut avoir connecté la clé USB M-Base // si vous avez acheté cette option).
- Choisir ou confirmer le patient et l'examen à exporter sur la clé (vous pouvez profiter d'avoir la clé pour exporter plusieurs examens de plusieurs patients) en utilisant **les touches ↓ et ↑** ainsi que **la touche Enter** pour valider chaque choix.
- Nommez chaque fichier d'examen pour le retrouver ensuite depuis votre ordinateur, en utilisant **chiffres & lettres** du clavier alphanumérique de l'appareil ainsi que la touche **Enter** pour finaliser.

## 5- RECUPERATION DES EXAMENS DANS LE LOGICIEL M-BASE

- Connectez votre clé sur un port USB de votre ordinateur PC
- Si votre version de Windows n'ouvre pas automatiquement dans une fenêtre le contenu de la clé, rendez-vous dans l'Explorateur Windows (ou « Ordinateur » ou « Poste de Travail ») et sur la clé, **double-cliquez sur le fichier M-Base.exe**.
- Une fois dans le logiciel, cliquez sur **Examen + Ouvrir** (ou sur le 1<sup>er</sup> icône rouge en haut de colonne gauche des icônes)
- Cliquez sur le bouton **Choisir** à la partie « **Créer un patient sur la base d'un examen** »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre ainsi, retrouvez et choisissez le fichier que vous avez nommé sur la clé.
- Depuis l'affichage de votre examen, profitez ensuite des fonctions d'analyse, d'impression pdf ou d'envoi par e-mail.

Pour toute autre information complémentaire, reportez-vous au manuel complet, ou contactez-nous :

**EOLYS matériel médical** – 8 rue de la Grange 69009 Lyon - Tél. 04 37 644 750 - Email [contact@eolys.fr](mailto:contact@eolys.fr)

# ECG EOLYS --- MANUEL SIMPLIFIE

Les étapes indiquées ci-après vous permettront de rapidement et simplement réaliser un examen avec votre appareil ECG éolys et de l'exploiter en édition et/ou en export sur informatique PC.

**Tout d'abord installez votre patient confortablement et placez sur lui les électrodes déjà reliées aux fiches banane du câble ECG** (usage possible de poires, pinces membre, électrodes jetables à languette, patch ou pression, ou une ceinture pectorale).

**Allumez votre appareil** (le cas échéant branchez le au secteur, **interrupteur de charge sur la face arrière en position (1)** si l'écran vous indique un niveau de charge batterie trop bas // visuel de batterie vide Vs batterie pleine).

A partir de là, l'usage de votre ECG se fait en 2, 3 ou 5 temps, selon que vous projetiez ou non d'utiliser l'option informatique :

## 1- SAISIR LES DONNEES DU PATIENT

- Pressez les touches **MENU** => **PATIENT + Enter** => **NOUVEAU + Enter**
- Renseignez les infos à stocker dans l'examen et utilisez les flèches de direction **↓** et **↑** puis validez avec **OK + Enter**
- De retour à l'écran de choix PATIENT / COPIE / REGLAGE, appuyez sur **Esc** (Escape)

## 2- PRATIQUER L'EXAMEN

Appuyez sur la touche **AUTO** pour un test auto, ou sur la touche **START** pour un test manuel (changez le(s) groupe(s) de dérivation avec la touche **I, II.. V6** si vous n'êtes pas en tracé 12 pistes ; et en arrêtant le tracé avec la touche **STOP**). Selon les réglages, le tracé sortira sur l'imprimante en 4\*3, 2\*6, 2\*6+1, ou 12 pistes (MENU -> REGLAGES -> RAPPORT). **A noter** : si vous reliez à la sortie USB de l'appareil une imprimante laser compatible (langage PCL5 ou PCL6), sera édité un rapport A4/12 pistes.

## 3- ENREGISTRER L'EXAMEN

- Pressez la touche **MENU** puis avec la touche **→** de votre clavier, allez sur **COPIE** et pressez la touche **Enter**.
- Déplacez-vous avec la touche **→** sur **MEMOIRE** et appuyez sur Enter.
- Choisissez **SAUV.** avec la touche **Enter**. Les données ayant déjà été saisies avant le test, l'enregistrement est fini.

## 4- EXPORTER L'EXAMEN SUR LA CLE USB M-BASE

- Avec la touche **→**, allez sur **CLE USB** + pressez la touche **Enter** (si jamais vous avez éteint votre appareil ou que vous êtes revenu à l'écran de départ => **MENU** + **→** + **COPIE** + **Enter** + **→** + **CLE USB** + **Enter**)
- Choisissez **EXPORT** avec la touche **Enter** (il faut avoir connecté la clé USB M-Base // si vous avez acheté cette option).
- Choisir ou confirmer le patient et l'examen à exporter sur la clé (vous pouvez profiter d'avoir la clé pour exporter plusieurs examens de plusieurs patients) en utilisant **les touches ↓ et ↑** ainsi que **la touche Enter** pour valider chaque choix.
- Nommez chaque fichier d'examen pour le retrouver ensuite depuis votre ordinateur, en utilisant **chiffres & lettres** du clavier alphanumérique de l'appareil ainsi que la touche **Enter** pour finaliser.

## 5- RECUPERATION DES EXAMENS DANS LE LOGICIEL M-BASE

- Connectez votre clé sur un port USB de votre ordinateur PC
- Si votre version de Windows n'ouvre pas automatiquement dans une fenêtre le contenu de la clé, rendez-vous dans l'Explorateur Windows (ou « Ordinateur » ou « Poste de Travail ») et sur la clé, **double-cliquez sur le fichier M-Base.exe**.
- Une fois dans le logiciel, cliquez sur **Examen + Ouvrir** (ou sur le 1<sup>er</sup> icône rouge en haut de colonne gauche des icônes)
- Cliquez sur le bouton **Choisir** à la partie « **Créer un patient sur la base d'un examen** »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre ainsi, retrouvez et choisissez le fichier que vous avez nommé sur la clé.
- Depuis l'affichage de votre examen, profitez ensuite des fonctions d'analyse, d'impression pdf ou d'envoi par e-mail.

Pour toute autre information complémentaire, reportez-vous au manuel complet, ou contactez-nous :

**EOLYS matériel médical** – 8 rue de la Grange 69009 Lyon - Tél. 04 37 644 750 - Email [contact@eolys.fr](mailto:contact@eolys.fr)