

## ENTRETIEN APPAREIL CO-TESTER

- Utiliser un embout buccal **en carton à usage unique pour chaque nouveau patient.**
- Recommander au patient de souffler uniquement et ne jamais inspirer dans l'appareil.
- Nettoyer **entre chaque patient l'appareil CO-Tester sur sa face externe** avec un chiffon à usage unique imbibé de détergent-désinfectant type VIRUFEN (ne pas utiliser de solution à base d'alcool).
- **Changer de piègeur à CO** (dispositif plastique) **entre chaque patient** (nettoyage -désinfection impératif avant réutilisation).

### **L'entretien du piègeur:**

- trempage sans démontage dans une solution nettoyante désinfectante HEXANIOS GR+ (1 sachet pour 5 litres d'eau) pendant 15 minutes.
- rinçage à l'eau courante
- séchage par tamponnement avec un chiffon propre à usage unique