



et



vous présentent :

# ECG-PC EOLYS

**Enregistreur numérique d'ECG**

Manuel d'installation et d'utilisation

CE 0197

Edition III

Edition	Date	Changes	Editor
01	10.01.11	Introduction	DM
03	10.02.16	USB connection, Change of address	DM

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	<b>4</b>
<b>PRÉCAUTIONS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ</b>	<b>4</b>
<b>DESCRIPTION</b>	<b>5</b>
CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>6</b>
ENREGISTREUR	6
TOUCHES DE FONCTION ET INDICATEURS LUMINEUX	6
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	7
POUR REMPLACER LES PILES	7
<b>PROCEDURE D'INSTALLATION ECG-PC EOLYS®</b>	<b>8</b>
1- INSTALLATION DU LOGICIEL MTRACE-PC PILOTANT LES ECG	8
2- INSTALLATION DU BLUETOOTH ET JUMELAGE DE L'ECG	9
3- INSTALLATION DE L'ECG SI CONNECTÉ EN USB	11
4- INSTALLATION DE L'ELEMENT ANALYSE ECG	11
5- REGLAGE DE COMMUNICATION DANS LE LOGICIEL M-TRACE PC	11
<b>PROCEDURE D'UTILISATION ECG-PC EOLYS®</b>	<b>13</b>
1- CREEZ UNE FICHE PATIENT	13
2- POUR LANCER UN TEST	13
3- ACQUISITION D'UN EXAMEN	14
4- FONCTIONS ACCESSIBLES PENDANT UN EXAMEN EN DIRECT	14
5- FONCTIONS ACCESSIBLES SUR UN EXAMEN EN DIFFERE	16
6- REGLAGES DES FONCTIONS D'EXPLOITATION D'UN EXAMEN :	17
7- ANALYSE DES RÉSULTATS SELON LE STANDARD/ALGORHYTME HES	20
8- BASE DE DONNEES	21
ARRANGEMENT DES ELECTRODES	22
NETTOYAGE, STERILISATION, MAINTENANCE	23
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR L'USAGE ET LE TRANSPORT	23
<b>DECLARATION DE CONFORMITE /COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE</b>	<b>24</b>
SYMBOLES D'USAGE	25

## INTRODUCTION

L'électrocardiogramme est la représentation graphique (diagramme) de l'activité électrique du cœur par rapport au temps. Il permet l'examen du mécanisme et de l'endroit où se déroulent les impulsions électriques. Il permet également de vérifier son fonctionnement dans le système électrique et le muscle cardiaque, tout en étudiant ses réactions.

Indirectement, il permet d'examiner et de diagnostiquer le comportement du muscle cardiaque, sa perfusion, l'oxydation et l'étanchéité. Les écarts dans l'enregistrement de l'ECG peuvent aider à reconnaître les conditions morbides rendant invalide le travail des muscles cardiaques, ou sa réaction au stimulus électrique qui réduit la perfusion et de l'oxydation de ce muscle, ce qui provoque de mauvaises impulsions ou des flux incorrects. Il faut considérer avec emphase que l'ECG est seulement l'un des examens complémentaires qui révèle son plein potentiel seulement avec une vue clinique complète de l'état du patient. Certaines exceptions peuvent être les infarctus du myocarde (pas toujours) où l'enregistrement de l'ECG est évident et sans équivoque, ce qui permet de faire un bon diagnostic - qui montrent également la place exacte dans la zone du muscle cardiaque - sans voir le patient. Dans le reste des cas de maladie cardiaque, l'ECG semble de rare autorité, mais il s'agit d'un examen complémentaire vital.

L'enregistreur ECGPC EOLYS® est relié au PC via Bluetooth en connexion sans fil, ou par USB en liaison filaire, ce qui permet un enregistrement direct des impulsions du cœur de la façon la plus complète et la plus confortable visuellement : 12 pistes à l'écran. Cet appareil est compact et de petites dimensions et alimenté par piles. Il permet de conduire un examen de la plus simple des façons.

## Précautions et instructions de sécurité

- Toutes les instructions suivantes doivent être lues avant d'utiliser le matériel. Il permettra à la fois un usage et une maintenance de l'appareil appropriés et à long terme.
- Il est vital de bien vérifier périodiquement l'état et la qualité des accessoires et de l'appareil lui-même. En cas de doute, contactez rapidement tout personnel qualifié.
- La chose la plus importante est de faire attention à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas endommagé. Afin d'éviter tout choc électrique à des personnes.
- Utiliser simultanément le matériel avec un stimulateur cardiaque ou tout autre type de stimulateur électrique n'expose ni les patients ni le personnel médical à un danger.
- Il est important de ne jamais toucher ni le patient ni l'appareil connecté à lui lors d'une défibrillation.
- L'ECG ne peut pas être utilisé simultanément avec 1 matériel chirurgical opérant à haute fréquence.
- L'appareil n'est pas conçu pour travailler là où il y a combustibles ou fumées inflammables.
- En cas de connexion simultanée à l'électrocardiographe et à un autre matériel sur le patient, il est nécessaire de vérifier le risque encouru par d'éventuel courant de fuite.
- L'électrocardiographe dispose d'une protection de sécurité CF. Ce qui permet de procéder à des examens directement sur le cœur du patient.
- Connectez toujours les électrodes avec le maximum de précaution, évitant aux connecteurs de toucher toute partie métallique, incluant la masse.
- Ne procédez pas vous-même au démontage ou à l'ouverture du matériel, ce qui vous exposerait un danger d'électrocution ou à tout autre danger de ce type. Veuillez vous référer à un personnel qualifié pour la maintenance ou le dépannage du matériel.
- Déplacer l'appareil entre différents lieux ayant une grande différence de température peut provoquer de la buée à l'intérieur. Si jamais de la condensation avait lieu, ne l'allumez surtout pas! Attendez dans ce cas quelques heures si nécessaire pour que l'appareil ait récupéré une température correcte et que la condensation se soit évaporée.

## Description

L'enregistreur ECGPC EOLYS® est un dispositif électronique sophistiqué et moderne. Il est dédié à l'enregistrement d'impulsions ECG de 12 dérivations standard visualisable en 12 pistes à l'écran de tout ordinateur PC. Les signaux sont transférés au PC par une connexion sans fil en Bluetooth. Une coque plastique esthétique et un clavier à membrane rendent l'appareil très facile à nettoyer.

Pour être opérationnel l'enregistreur nécessite d'être couplé à un ordinateur PC équipé de Microsoft Windows XP, Vista et Seven, à la fois en 32 et en 64 bits. L'ordinateur doit être conforme au minimum de la Directive EN60950. De plus, il ne doit pas se trouver à proximité du patient mais au moins à 1,5 m de la zone d'examen.

## Contenu de l'emballage

Assurez-vous bien d'avoir bien été livré des éléments suivants au minimum :

	<b>Élément</b>	<b>Qté</b>
1.	L'appareil ECG PC EOLYS®	1 pc.
2.	Adaptateurs pour électrodes jetables	10 pcs.
3.	Câble patient ECG 10 brins à fiche banane	1 pcs.
4.	Électrodes jetables	100 pcs.
5.	Piles LR6 AA	2 pcs.
6.	CD-ROM d'installation du logiciel	1 pc.
7.	Ce manuel d'instruction	1 pc.
8.	Dongle USB de liaison Bluetooth	1 pc.
9.	Dongle USB pour module d'interprétation	1 pc.
10.	Câble USB pour connexion filaire de l'ECG	1 pc.

Contactez votre fournisseur si jamais un ou plusieurs de ces éléments venai(en)t à manquer.

## FABRICANT



M4Medical Spółka z o.o.  
ul. St. Leszczyńskiego 60  
20-068 Lublin – Poland

## Vue d'ensemble

### Enregistreur



### Touches de fonction et indicateurs lumineux



Bouton On/Off



Indication de fonctionnement



Indicateur du niveau faible des piles

## Spécifications techniques

Dimensions	61 x 95 x 28 mm
Poids	< 0,1 kg (sans les piles)
Alimentation	DC 3V
Piles internes	2x piles cells LR6 type AA (rechargeables ou jetables)
Dérivations ECG	12 dérivations ECG standard: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dérivations membre d'Einthoven I, II, III</li><li>– Dérivations membre de Goldberger aVR, aVL, aVF</li><li>– Dérivations précordiales de Wilson V1, V2, V3, V4, V5, V6</li></ul>
Convertisseur A/D	Convertisseur 24 bit
Ratio CMRR	> 100dB
Bande de fréquences	0,05-150Hz
Impédance d'entrée	> 10MΩ
Gamme de contrôle	> 300 mV 10 mVpp
Résolution	0,5 μV
Fréquence d'échantillonnage	1000 Hz
Filtres digitaux	50Hz, 60Hz, 35Hz, 25Hz, antidérive
Sécurité utilisateur	Protection Type CF (EN60601-1) Appliances Class Internal Power Supply (EN60601-1)
Classe / Groupe	Classe B / Groupe 1 (CISPR-11)
Conditions d'environnement d'usage	– Température +10 à +40°C (+50 à +104°F) – Humidité relative 25 to 95% (non-condensée)
Communication	Bluetooth ou USB

Le circuit d'entrée est protégé contre les impulsions de défibrillation. Après de telles impulsions, l'onde ECG apparaîtra à nouveau au bout de 10 secondes.

### **Pour remplacer les piles**

Pour installer ou remplacer les piles, ouvrez la trappe sous l'appareil. Pour y arriver il faut faire glisser la trappe. Placez 2 piles neuves LR6 de type AA (si rechargeables, elles doivent être pleinement chargées) en faisant attention à la polarité (+) et (-). Une fois que les piles sont correctement installées, refermez la trappe. Le matériel peut maintenant être utilisé.

L'appareil contrôle en permanence le niveau des piles. Un niveau de piles trop faible sera indiqué par une diode de couleur rouge sur le clavier (  ).







Si vous pensez ne pas utiliser le dispositif pendant une longue période, retirez alors les piles.




# PROCEDURE D'INSTALLATION ECG-PC\_EOLYS®

(depuis la version 2.01)

## 1- INSTALLATION DU LOGICIEL MTRACE-PC® PILOTANT LES ECG :

- 1- Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD/DVD-ROM. Si vous n'avez pas de lecteur CD alors téléchargez l'application en ligne : [www.eolys.fr/content/30-telechargements-page-1](http://www.eolys.fr/content/30-telechargements-page-1) (info 2014-04-18).
- 2- Attendez quelques instants ; si le lancement automatique de l'installation ne se réalisait pas, ouvrez « Poste de Travail » et pointez sur le lecteur CD pour exécuter « **startsetup.exe** ».
- 3- L'installation démarre comme illustré par l'écran suivant (choisissez « français » ...)

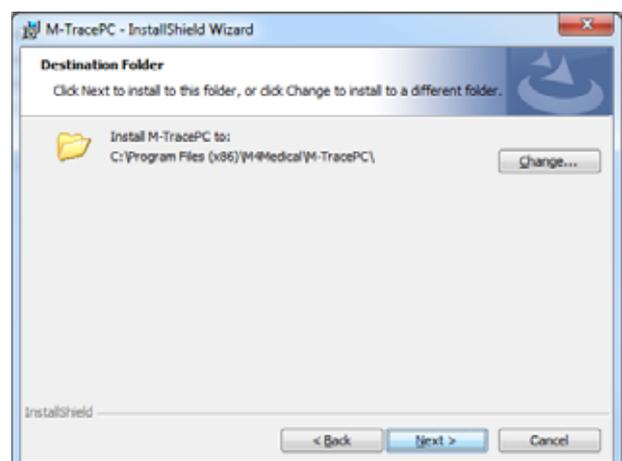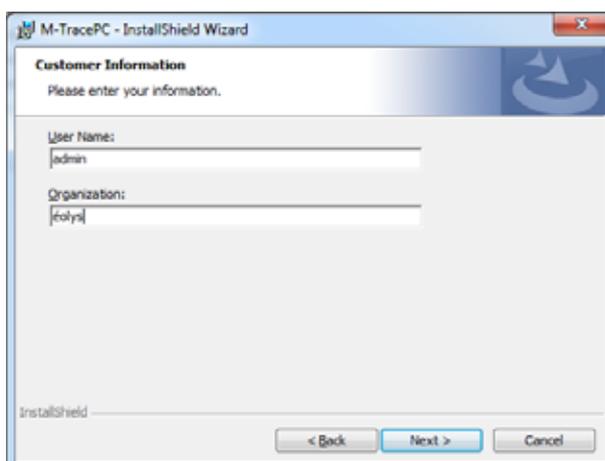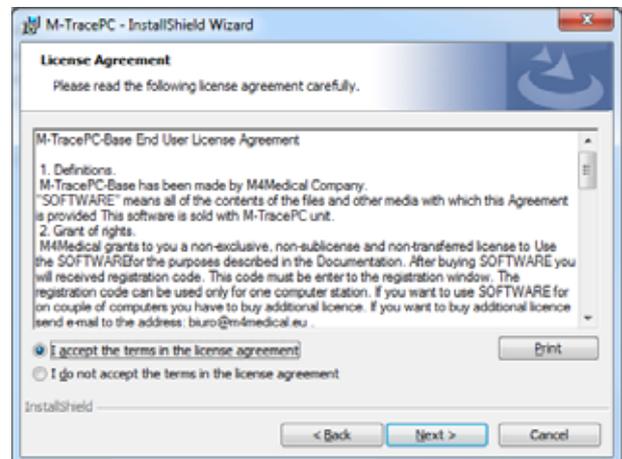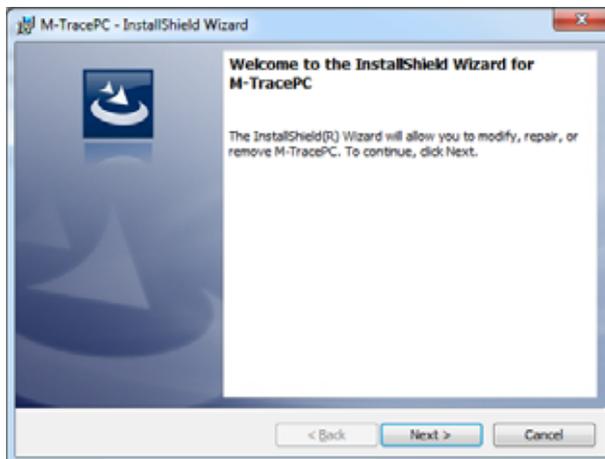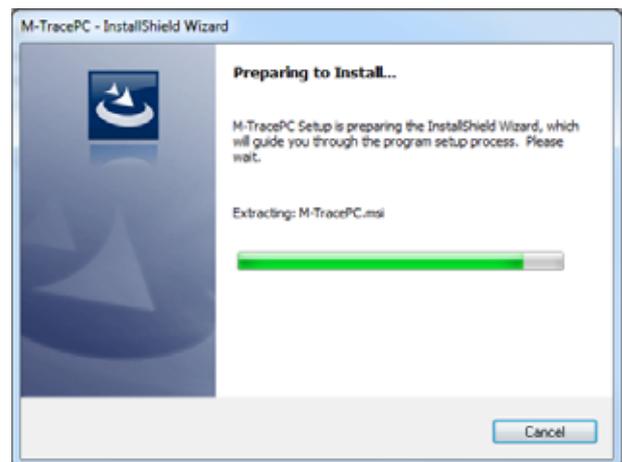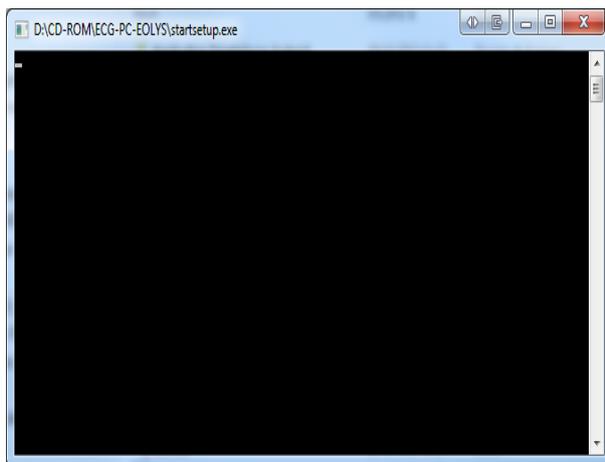

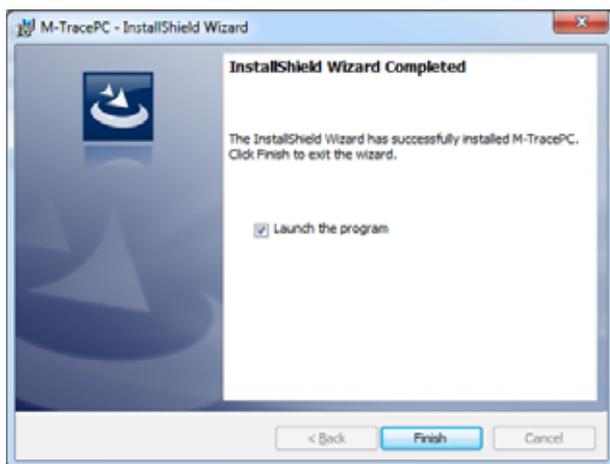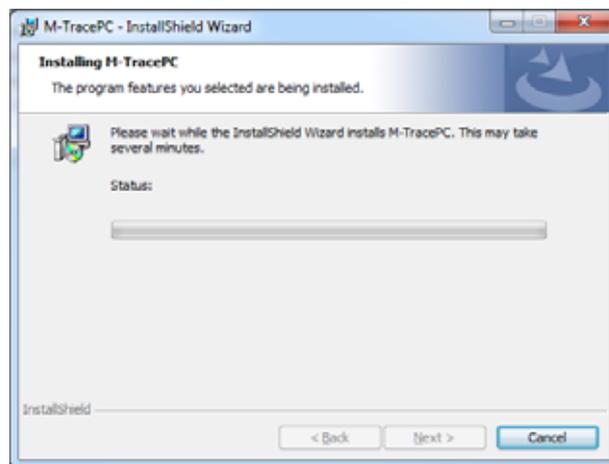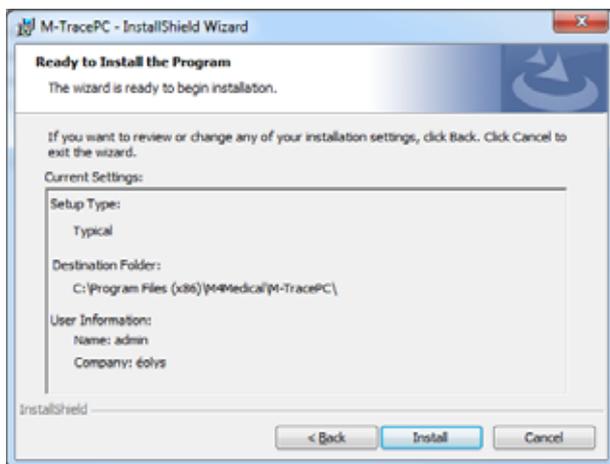

En fin d'installation, cliquez sur « **finish** » ; à l'ouverture automatique dans le logiciel (si vous ne décochez pas « Launch the program ») il vous sera demandé la 1<sup>ère</sup> fois de saisir votre clé de licence comme illustré en capture d'écran ci-dessus (code indiqué sur face arrière de la jaquette CD) ; un code à 28 caractères.

## 2- INSTALLATION DU **BLUETOOTH** ET JUMELAGE DE L'ECG :

1- **Connectez la clé NOIRE** (dongle Bluetooth) pour que Windows le détecte et l'installe automatiquement comme cela est illustré ci-après (détection et installation par Windows) :



**Note 1** : si votre ordinateur est déjà équipé de l'option Bluetooth (le cas de nombreux PC portables ou de tablettes), soit vous le désactivez complètement et utilisez notre système, soit vous utilisez le vôtre, mais idéalement en laissant Windows gérer la connexion.



**Note 2** : si votre ordinateur est trop restrictif dans ses réglages et ne permet pas une installation automatique des drivers du périphérique Bluetooth ainsi connecté, il se peut que vous ayez à valider l'installation des drivers au moyen de Windows Update.

2- Il faut maintenant appairer votre ECG avec votre ordinateur via le Bluetooth :



2.1 Allumez votre ECG (après y avoir introduit correctement les 2 piles) en appuyant sur la touche de mise en route et en vous assurant que la diode verte du signal flashe bien

2.2 Repérez maintenant l'icône du Bluetooth sur votre barre des tâches en bas à droite de votre écran (ci-dessus entouré de rouge) et en vous positionnant dessus, faites un clic droit de souris pour choisir la fonction « **Ajouter un périphérique** » :

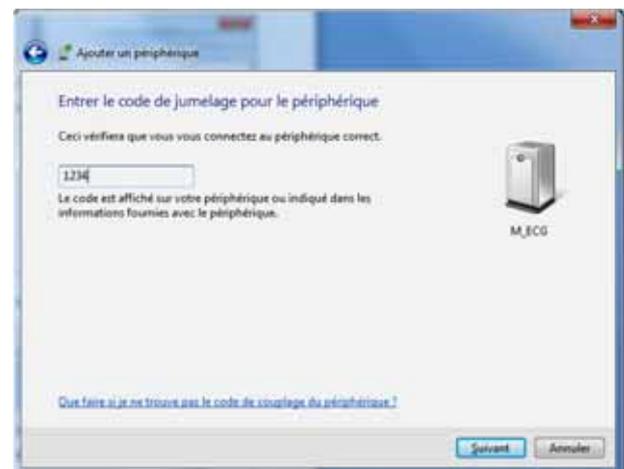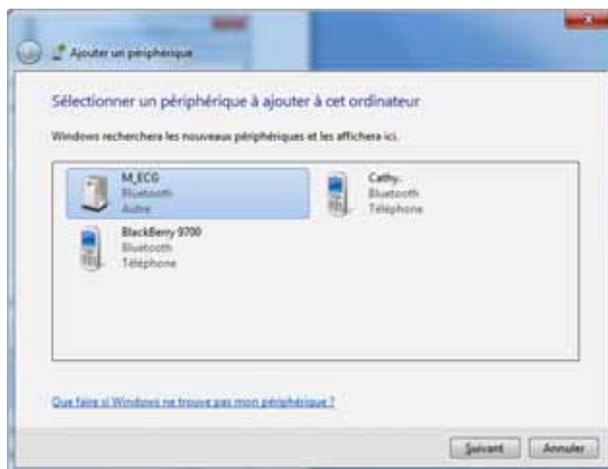

S'il est demandé, il faut saisir **le CODE** fabricant pour appairer => « **1234** ».



### 3- **INSTALLATION DE L'ECG SI CONNECTÉ EN USB :**

Après avoir relié et connecté le boîtier ECG au PC, le système va installer automatiquement les drivers nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil (connexion Internet requise pour installation des drivers via Windows Update). Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet et que l'option Windows Update est désactivée pour l'installation de drivers, il vous faudra installer les drivers manuellement à partir du CD-ROM fourni avec le matériel.

L'enregistreur est reconnu par le système en tant que port COM – son numéro peut être trouvé – voire changé au besoin – dans le gestionnaire de périphériques sous Windows.

### 4- **INSTALLATION DE L'ELEMENT ANALYSE ECG :**

**Connectez la clé BLEUE** (dongle déverrouillant l'accès à l'analyse et l'interprétation HES) pour que Windows le détecte et l'installe comme illustré (détection et installation par Windows) :



### 5- **REGLAGE DE COMMUNICATION DANS LE LOGICIEL M-TRACE PC :**

- 1- **Allumez votre ECG** et vérifiez qu'il flashe bien en vert sur la diode de gauche (*celle de droite s'allumera en rouge le jour où l'appareil devra vous signaler que le niveau des piles est faible*).
- 2- **Entrez dans le logiciel MTrace PC** en double-cliquant sur l'icône qui a été créé sur le bureau.
- 3- Allez dans **Réglages → Réglages de communication** et laissez le système rechercher votre ECG (avec son numéro de série) par la méthode Bluetooth de balayage radio comme illustré ici :



- 4- Une fois le balayage fini le logiciel vous liste tous les appareils qu'il a détectés ; une fois l'appareil sélectionné dans la liste, **cliquez sur Test de connexion** (*attention à ce que votre appareil ne se soit pas mis en veille entre temps, auquel cas rallumez-le*) :



Votre matériel est maintenant appareillé par Windows et bien pris en charge par votre logiciel. Il ne vous reste qu'à profiter du logiciel en le réglant selon vos préférences.

Si vous voulez que le matériel transmette via un port COM (Bluetooth ou USB), cliquez sur „Numéro de port COM” pour ensuite renseigner le bon numéro (gestionnaire de périphériques Windows) :



# PROCEDURE D'UTILISATION ECG-PC\_EOLYS®

## 1- CREEZ UNE FICHE PATIENT avant la visualisation et l'acquisition d'un examen.


Cliquez sur « Nouveau patient » et remplissez les éléments (Note : aucun champ n'est obligatoire mais pour interpréter, mieux vaut avoir indiqué sexe/taille/poids/date de naissance) :

The screenshot shows a window titled "Données patient" with the following fields:

- ID: [ ]
- Nom de famille: [ ]
- Prénoms: [ ]
- Nom d'affiliation: [ ]
- Sexe:  Féminin  Masculin
- Taille: [ ]
- Poids: [ ]
- Numéro de sécurité sociale: [ ]
- Numéro de téléphone: [ ]
- Adresse:
  - Rue: [ ]
  - Numéro: [ ]
  - Code postal: [ ]
  - Localité: [ ]
  - Pays: [ ]
- Date de naissance:
  - Jour: [ ]
  - Mois: [ ]
  - Année: [ ]
- Informations supplémentaires: [ ]


Buttons: Ok, Annuler

2- **POUR LANCER UN TEST** sur le patient créé (ou sur un ancien que vous retrouverez à l'aide de l'ascenseur, ou des outils de recherche mis à votre disposition sous la liste des patients) cliquez sur « Nouvel examen » en vous assurant que l'appareil est bien allumé (diode verte) :

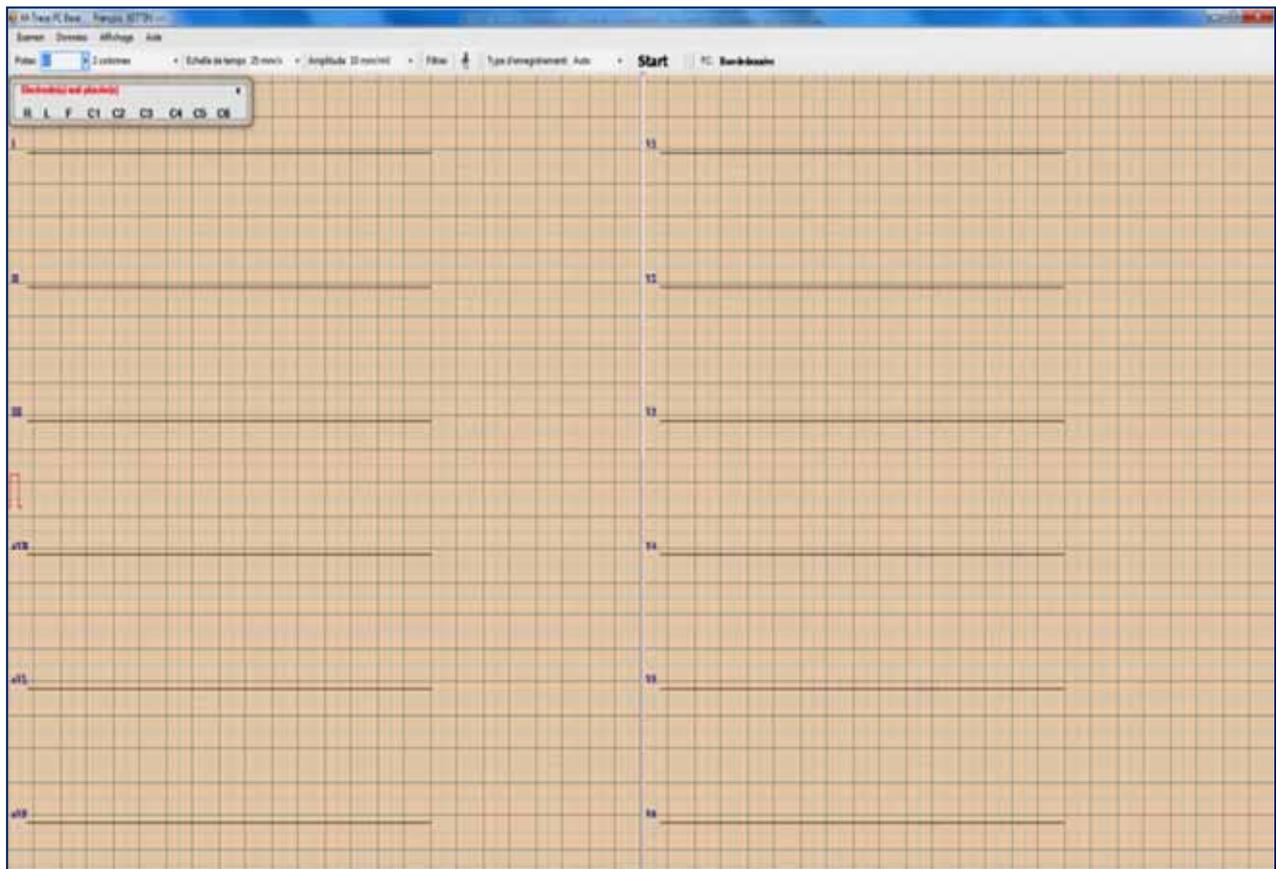

**Le logiciel vous prévient des défauts de connexion électrode** => si une ou plusieurs électrodes ne sont pas connectées, ou mal connectées ; il vous liste exactement laquelle/lesquelles.

3- **ACQUISITION D'UN EXAMEN** déroulant sur votre écran : cliquez sur le bouton START :

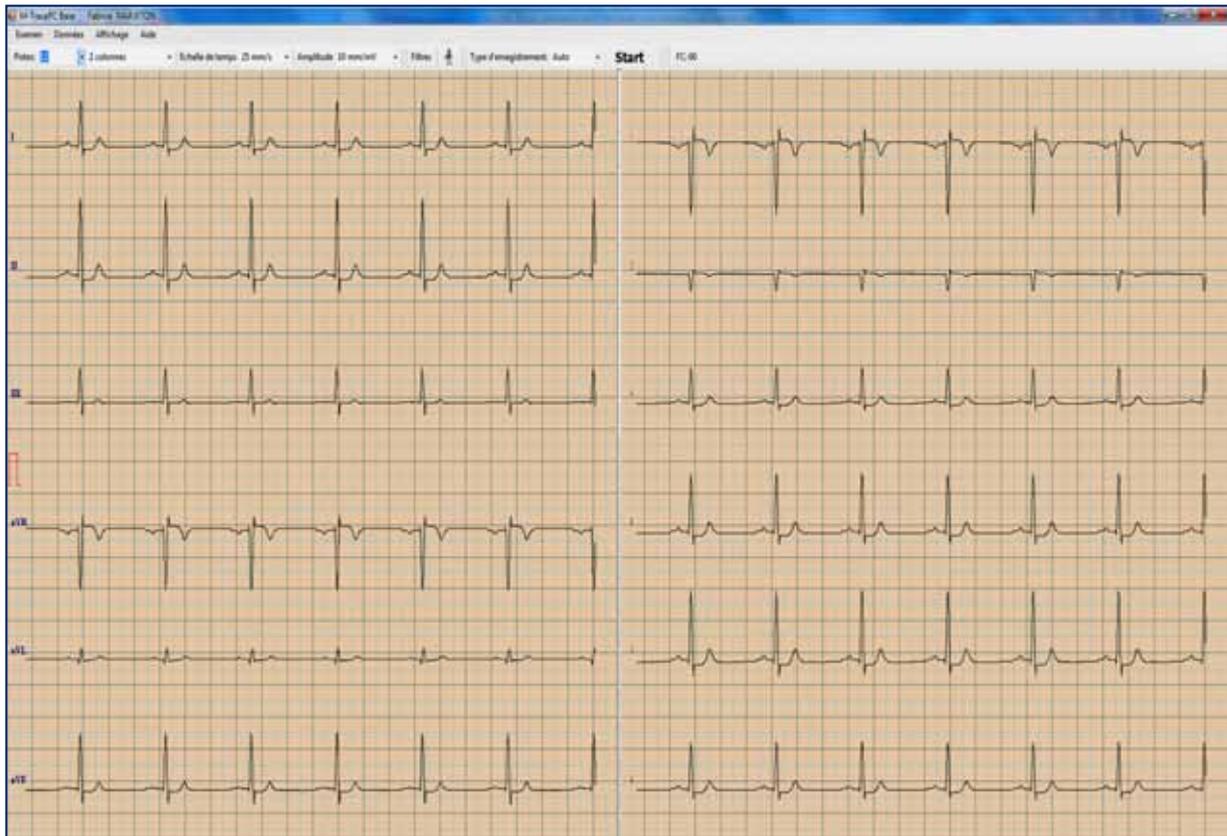

3.1- Il existe deux sortes d'acquisitions du signal ECG :

- **AUTOMATIQUE** => 10 sec. acquises, enregistrées et exploitables ensuite,
- **MANUEL** => dans la limite de 24H, également exploité dans l'écran suivant


3.2- Il existe deux façons d'accéder aux fonctions du logiciel (piloter et exploiter ensuite) :

- **SOURIS**
- **RACCOURCIS CLAVIER**


4- **FONCTIONS ACCESSIBLES pendant la visualisation d'un examen en DIRECT :**

- **Nombre pistes écran** : 1/3/6/12 (1 colonne ou 2 colonnes des principales et des précordiales)
- **Echelle temps (vitesse)** : 2,5/5/10/25/50/100 mm/s (par défaut : 25 mm/s)
- **Amplitude signal (sensibilité)** : 5/10/20/40/50 mm/mV (par défaut 10 mm/mV)
- **Filtres** pour atténuer le parasitage - 3 niveaux de filtrations possible :
  - Isoligne : à choisir entre 0,05/0,12/0,25 Hz (par défaut en 0,25 Hz)
  - Bande étroite : à choisir entre 25/35/150 Hz (par défaut en 35 Hz)
  - Ligne d'alimentation électrique : à choisir entre 50/60 Hz (par défaut en 50 Hz)
- **Type d'enregistrement** : à choisir entre Auto et Manuel (maxi 24H) (par défaut : Auto)
- **Fréquence cardiaque** : valeur affichée en haut (selon la taille de votre écran, il est possible que des fonctions ne soient visibles qu'en cliquant sur une petite flèche en haut à droite).


Pendant l'acquisition de l'examen : une barre de défilement du temps comme ci-dessous :

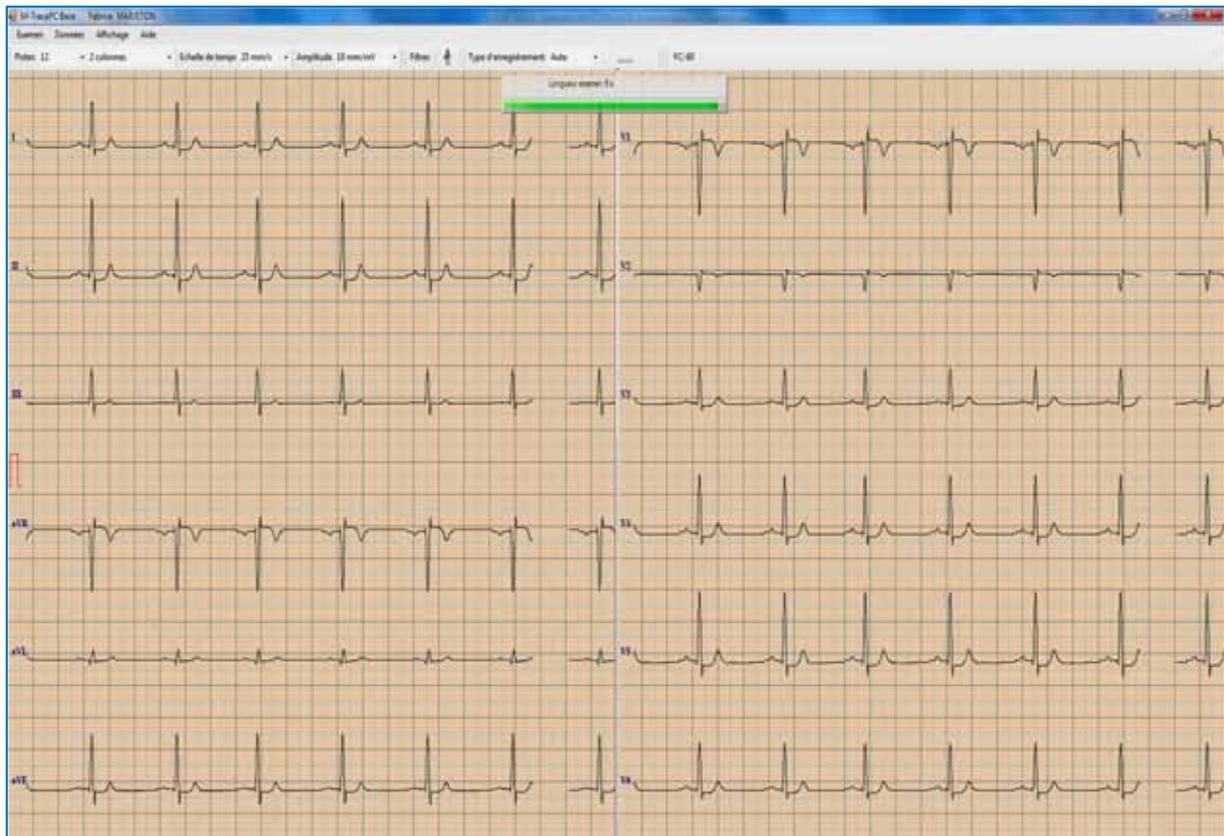

Après, vous restez dans la vue en direct mais est apparu le bouton **REVOIR L'EXAMEN**:

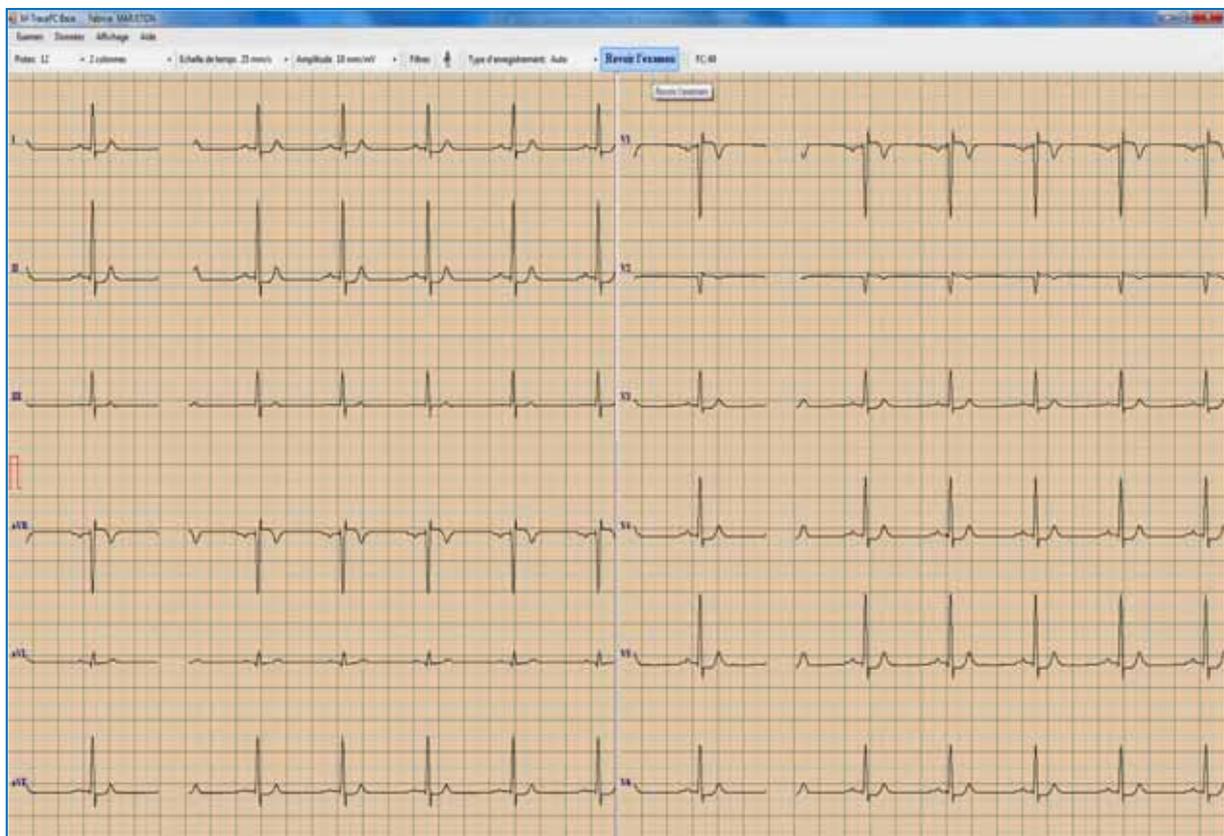

En cliquant sur cet icône vous accédez à votre examen figé comme ci-dessous :

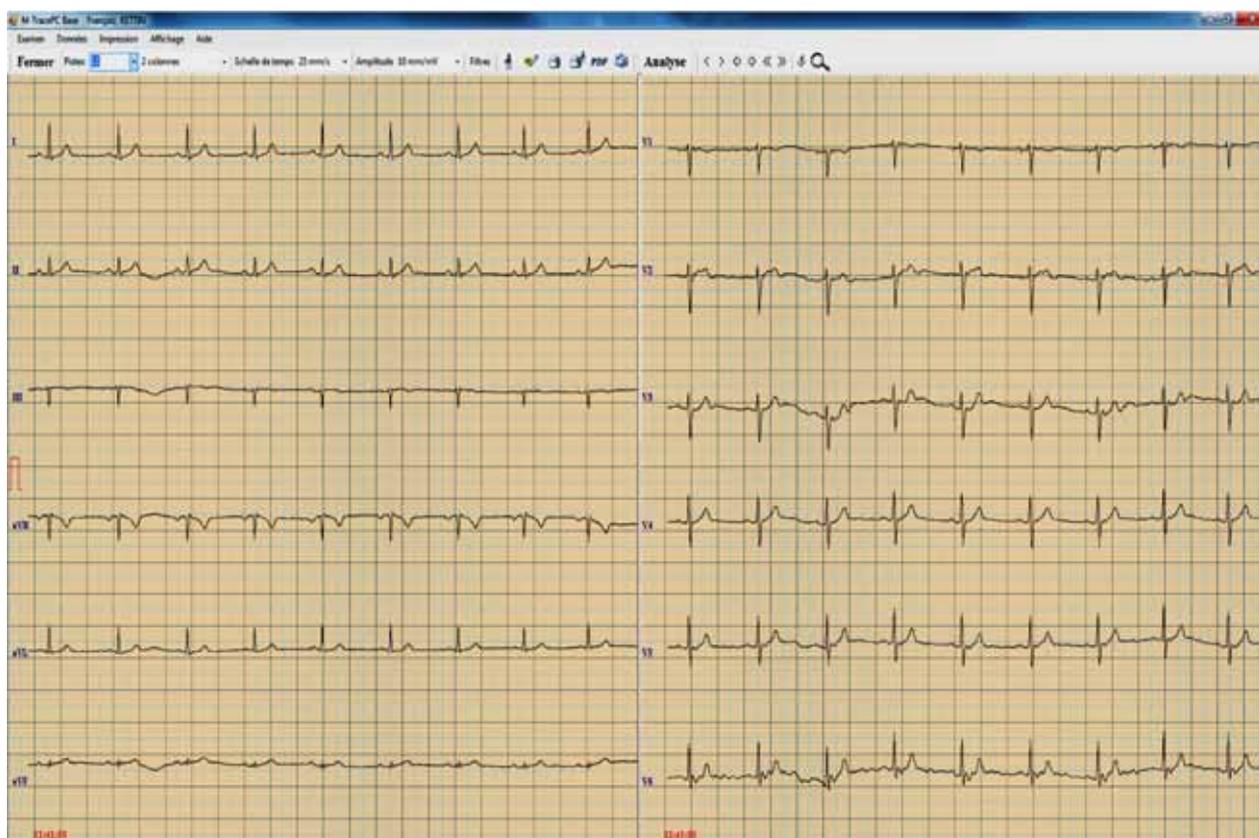


## 5- FONCTIONS ACCESSIBLES dans l'écran d'un examen figé (en DIFFERE) :

- **Affichage - fond de l'ECG** : plusieurs fonds de couleur sont possible : bleu / jaune / rosé
- **Nombre de pistes écran** : 1/3/6/12 (1 colonne ou 2 colonnes des principales et des précordiales)
- **Echelle de temps (vitesse)** : à choisir entre 2,5/5/10/25/50/100 mm/s (par défaut sur 25 mm/s)
- **Amplitude signal (sensibilité)** : à choisir parmi 5/10/20/40/50 mm/mV (par défaut 10 mm/mV)
- **Filtres** utilisés pendant l'acquisition : juste visibles, ne peuvent plus être changés après coup
- **Données patient** : remplir la fiche si l'examen a du être fait en urgence ou la modifier
- **Description** : il vous est possible ici de saisir votre commentaire médical et de l'éditer sur un rapport avec votre en-tête (personnalisable à souhait en page d'accueil)
- **Rapport pour le médecin** : pour éditer le rapport d'examen sur l'imprimante localement installée
- **Rapport pour le patient** : pour éditer aussi le rapport d'examen et le remettre au patient
- **Envoi par e-mail** : pour envoyer le rapport d'examen à un correspondant sans passer par son logiciel de messagerie (type Outlook/etc) ou un webmail (type Yahoo/etc.)
- **Export en PDF** : pour exporter le rapport principal (selon réglages d'impression principale)
- **Analyse** : pour voir les résultats de calcul, mesure et analyse du module HES intégré (ne sera possible que si le dongle HES de couleur bleue est connecté sur un de vos ports USB)
- **Flèches de défilement** : pour avancer/reculer dans l'examen (possible également au clavier)
- **Base de données** : pour revenir à l'écran des patients (sinon : « Examen → Fin »)
- **Loupe** : pour zoomer de façon efficace sur un complexe P-QRS-T


## 6- REGLAGES des fonctions d'exploitation d'un examen :

### 6.1- Commande « Impression → Configuration d'impression principale »

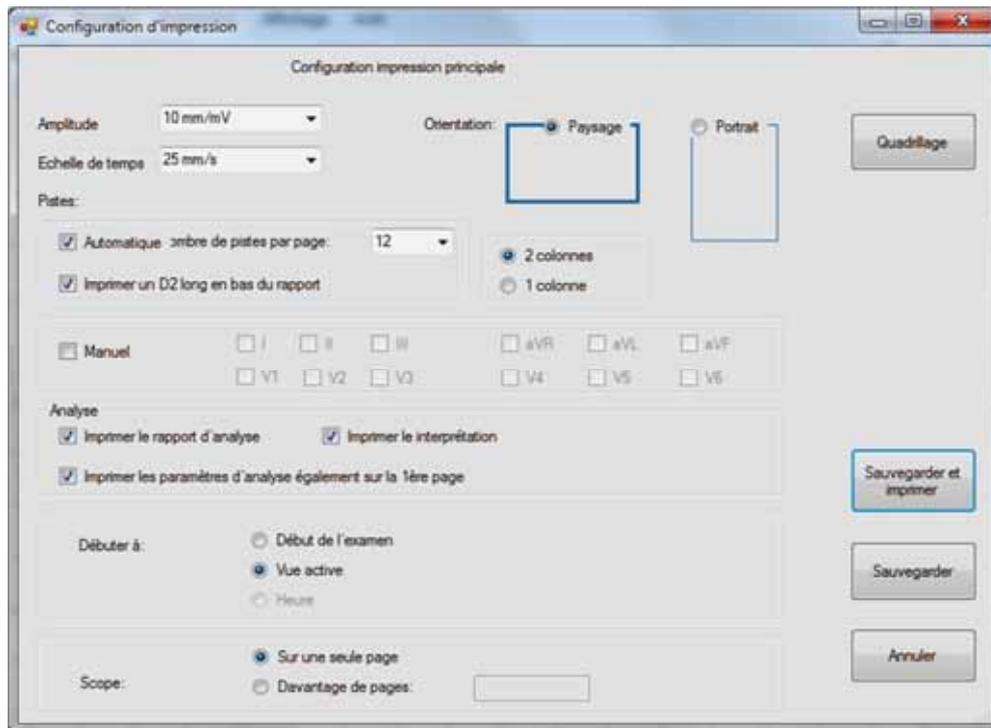

Il est possible de régler selon vos préférences le rapport tel que vous souhaitez l'éditer et tel que vous voulez le conserver (différence avec le rapport que vous voulez remettre à votre patient)

### 6.2- Commande « Impression → Configuration d'impression secondaire »

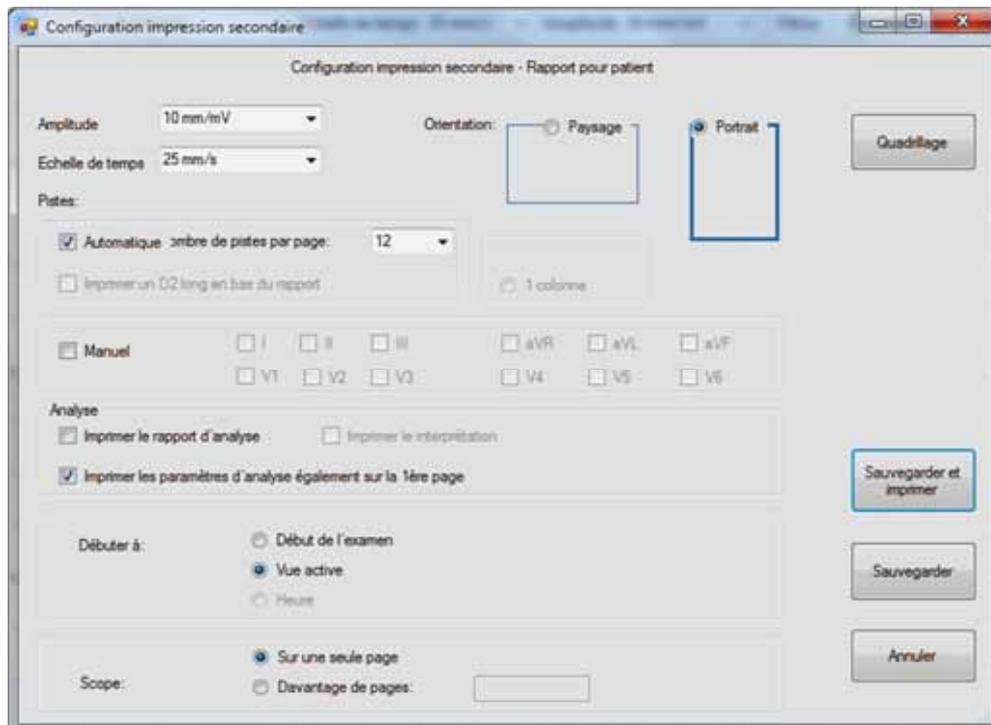

Comme indiqué déjà plus haut, vous pouvez changer le type de rapport (certains préfèrent ne pas fournir de rapports contenant une analyse automatique ni de calculs).

### 6.3- Commande « **Envoi par E-mail** »

Envoi email

A: cbourdon@wanadoo.fr

Objet: ECG - demande d'avis

Message: Chère Madame,  
Je prie de trouver ci-joint au format PDF le rapport d'un examen que je viens de pratiquer sur un de mes patients.  
Celui-ci semble présenter une anomalie et j'aurais grand besoin de connaître votre avis de spécialiste sur le sujet.  
Merci de bien vouloir revenir vers moi.

Fichier joint:  Examen SCP  Examen PDF

Votre compte e-mail:

Votre e-mail: dr.duranton@wanadoo.fr

Identifiant: dr.duranton@wanadoo.fr

Mot de passe: \*\*\*\*\*  Mémoriser mot de passe

Serveur SMTP: smtp.wanadoo.fr

Port: 25

Encodage SSL

Envoyer

Annuler

Réglages

Avant d'utiliser cette fonction, il faut effectuer quelques réglages en cliquant sur « Réglages » :

- **Votre e-mail** : renseignez l'adresse e-mail avec laquelle vous envoyez votre message
- **Identifiant** : répétez votre adresse e-mail ici
- **Mot de passe** : renseignez ici votre mot de passe de messagerie
- **SMTP** : serveur de messagerie sortant correspondant au FAI qui vous fournit votre ligne ADSL ou Internet (ex : smtp.free.fr ou smtp.orange.fr ou smtp.sfr.fr ou smtp.wanadoo.fr, etc.)
- **Port** : par défaut laissez le 25 et le cas échéant cherchez-le dans votre logiciel de messagerie

A noter :


- N'oubliez pas de cocher « Mémoriser mot de passe » et cliquez sur « Réglages »
- Faites attention à bien cocher « PDF » et décochez « SCP » ou « HES » pour bien envoyer un fichier que votre correspondant saura ouvrir et lire sur son poste
- SCP est un format de fichier que des logiciels de cardiologie compatibles peuvent lire

### 6.4- Commande « **PDF** »

(voir aussi dans le 1er écran du logiciel à « Réglages → PDF export » pour que l'export des rapports d'examen au format PDF soit fait **AUTOMATIQUEMENT** sans cliquer sur aucun bouton !)


Cette fonction est très utile dans différents cas :

- Si vous souhaitez ne pas imprimer de papier mais que vous voulez voir le rapport complet,
- Si vous voulez **intégrer le rapport dans votre logiciel médical** (la plupart permettent l'insertion de document et le format PDF est le format de fichier le plus utilisé au monde)

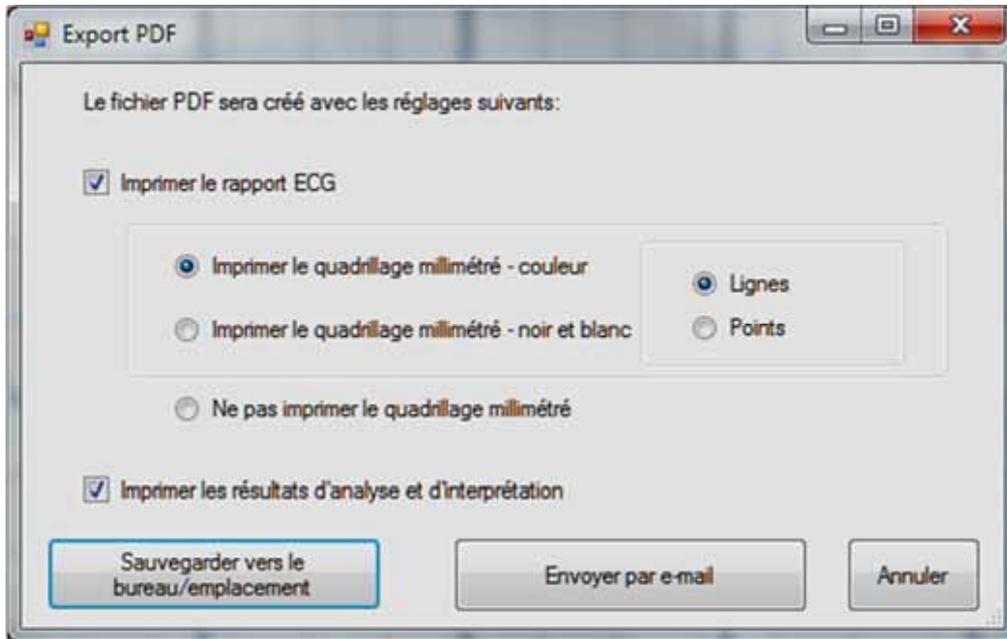

Plusieurs réglages sont ici possible (couleur/N&B/pas de quadrillage millimétré/millimétrage en point ou en ligne) et vous pouvez choisir entre « Sauvegarder vers le bureau/emplacement » et « Envoyer par e-mail » (pour ce dernier reportez-vous au paragraphe précédent).

Si vous cliquez sur « **Sauvegarder vers le bureau/emplacement** » voici la fenêtre qui s'en suit :

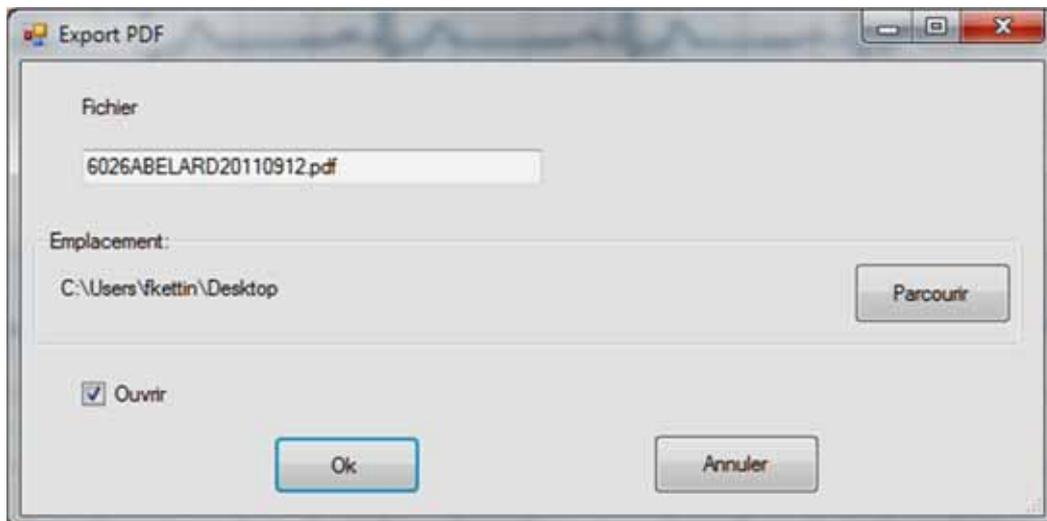


Le fichier d'export est **AUTOMATIQUEMENT** créé à partir de l'ID + du nom + de la date d'examen (format US :AAAMMJ) avec la possibilité de changer cela en saisissant vous-même le nom désiré.

Il est aussi automatiquement envoyé **vers votre bureau** mais en cliquant sur « **Parcourir** » vous pouvez changer le chemin, et créer un nouveau dossier (ex : PDF ECG) dans lequel vous retrouverez facilement vos examens exportés.

## 7- ANALYSE des résultats selon le standard HES (norme NE 60601-2-51)


Rappel : cette option n'est accessible que si vous connectez votre dongle de sécurité (bleu).

Si votre dongle n'est pas connecté ou pas/mal reconnu voici le message que vous pourrez avoir :

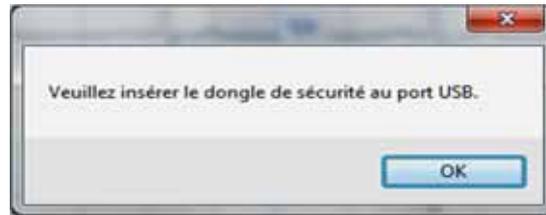

Sauf si vous aviez déjà eu accès auparavant au module d'analyse pour ce test et que vous aviez sauvegardé l'analyse (bouton « Sauvegarder »).

Lorsque vous accédez au module d'analyse HES, voici l'écran possible :

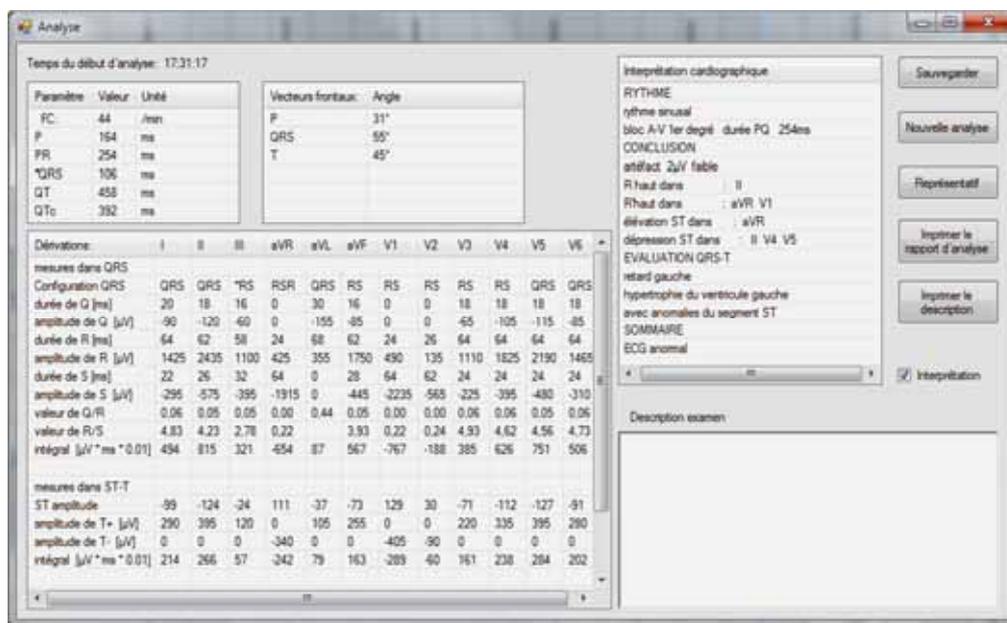

Voici les éléments disponibles dans cette fenêtre et qui pourront être édités dans une éventuelle 2<sup>nd</sup>e page de rapport d'examen (si réglé tel quel dans les réglages d'impression de rapports) :

- **Paramètres principaux** : FC (en nb de pulsations/mn) , P, PR, QRS, QT, QTc (en ms)
- **Vecteurs frontaux** : P, QRS et T (angles indiqués en °)
- **Tableau de mesures des 12 dérivations** : toutes les mesures pour chacune des 12 dérivations
- **Interprétation cardiographique** : à partir des résultats mesurés et calculés, le protocole HES fournit une interprétation textuelle (provenant d'un algorithme) et se déclinant sous 3 niveaux :
  - Etude du rythme
  - Conclusion
  - Evaluation QRS-T
  - Sommaire
- **Description examen** : reprend les commentaires personnels que vous avez pu saisir auparavant dans la fonction (éditable sur un rapport séparé avec votre entête)

### A noter :

- Nous vous rappelons instamment que ce module doit être considéré comme une aide à l'interprétation et qu'en aucun cas vous ne devez vous appuyer entièrement et définitivement sur les conclusions de ce module ; en fonction de nombreux critères les résultats d'analyse peuvent varier (positionnement des électrodes, type d'électrodes utilisées, contexte dans lequel l'examen a été réalisé, etc.)
- Il est possible de désactiver l'interprétation textuelle de ce module en décochant « Interprétation » (attention pour que cela n'apparaisse pas non plus sur le rapport d'analyse en 2<sup>nd</sup>e page, il faut le décocher aussi dans les réglages d'impression)


## 8- BASE DE DONNEES

Pour ajouter des listes de stockage contenant patients et examens il faut savoir qu'il est possible de positionner la base de données (appelée ici « liste de stockage ») en local (par défaut la liste se trouve à la racine programme : **Database**), mais aussi en réseau sur un autre poste ou sur serveur.

Il est possible d'ajouter (et nommer) des listes de stockage supplémentaires et si vous partagez le matériel et le logiciel à plusieurs, vous pourrez accéder aux examens de vos patients qu'aurait pris en charge un confrères pendant votre absence ; la fonction très utile dans le logiciel est celle-ci :

Il faut être dans le menu d'accueil où sont listés les patients (si vous êtes en page de visualisation d'examens : cliquez sur « **Base de données** ». Sélectionnez la liste de stockage souhaitée, sélectionnez un patient et sélectionnez l'examen que vous voulez faire passer d'une liste de stockage à une autre :

Cliquez sur le bouton « **COPIE** » pour ouvrir une fenêtre listant l'ensemble des listes de stockage :

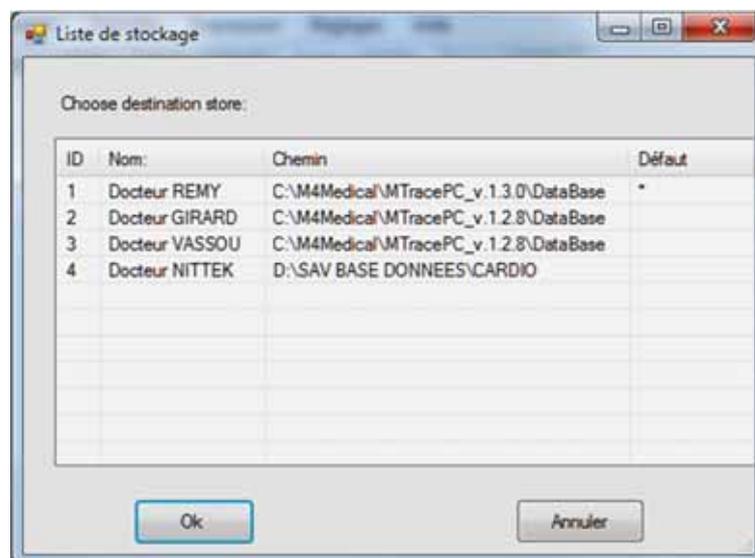


Et choisissez alors la liste vers laquelle vous voulez copier le patient et son examen, alors également visible dans votre liste à vous.

Quant à la **SAUVEGARDE DE VOS LISTES**, il faut l'effectuer en allant dans l'**Explorateur Windows** (ou **Ordinateur** sous Windows Vista et Windows Seven) et copier les répertoires de vos listes étant nommés **Database** à l'endroit où vous les avez positionnés depuis le logiciel.

## Arrangement des électrodes

Le matériel est équipé d'un câble patient 10 brins qui se relie ainsi aux électrodes :

Type de dérivation	Dérivation	Connexion – Positionnement sur le corps
Dérivations d'Einthoven des membres bipolaires (4 électrodes)	Rouge	Poignet droit
	Jaune	Poignet gauche
	Vert	Chevilles gauche
	Noir	Chevilles droite (point de référence, masse)
Dérivations renforcées unipolaires de Goldberger	aVR	A l'électrode poignet droit
	aVL	A l'électrode poignet gauche
	aVF	A l'électrode cheville gauche
Dérivations précordiales de Wilson	V1	Placée à droite du sternum dans le 4ème espace intercostal (IV)
	V2	Placé à gauche du sternum dans le 4ème espace intercostal (IV)
	V3	Placé directement entre V2 et V4
	V4	Placé à gauche du sternum dans le 5ème espace intercostal (V) dans la ligne médio-claviculaire
	V5	Placé à gauche du sternum dans le 5ème espace intercostal (V), à l'horizontal de V4 dans la ligne antérieure axillaire
	V6	Placé à gauche du sternum dans le 5ème espace intercostal (V), à l'horizontal de V4 et V5 dans la ligne médio-axillaire

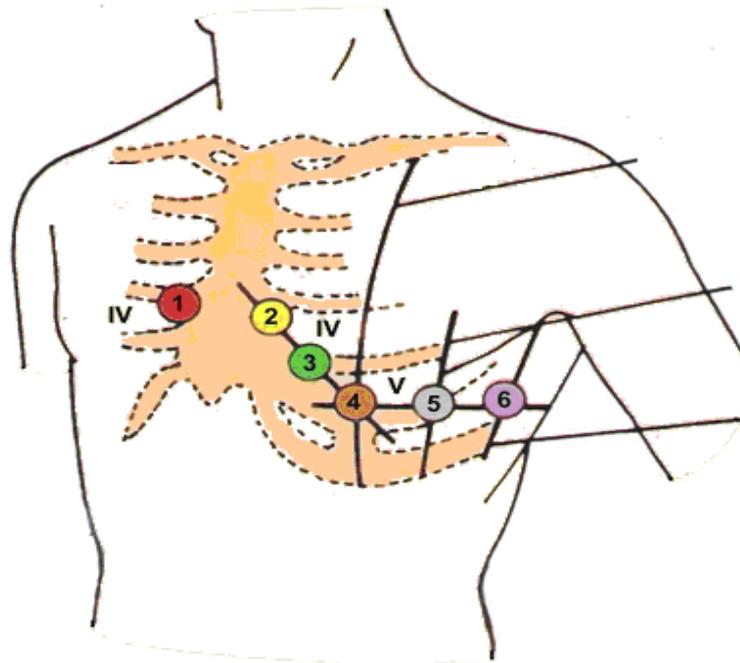

Le matériel suit en permanence l'état de la connexion de toutes les électrodes. Si jamais une électrode n'est pas en contact correctement avec la peau ou pas située au bon endroit, le diagramme de la dérivation concernée apparaît en rouge. Pour faire un enregistrement convenable, il est nécessaire que les électrodes soient proprement installées. C'est pourquoi il est préférable de commencer à connecter les précordiales.

## **Nettoyage, stérilisation, maintenance**

Attention ! – Avant tout nettoyage ou maintenance, veuillez éteindre le dispositif et retirer les piles !

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs, de diluants, d'alcool, de spray ou d'autres solvants chimiques. Utilisez uniquement un chiffon doux et propre - sec ou légèrement humidifié avec de l'eau propre. Il est recommandé de nettoyer le dispositif au moins une fois par mois. Si vous utilisez très fréquemment le matériel alors nettoyez-le en conséquence.

## **Conditions environnementales pour l'usage et le transport**

Ce dispositif doit être maintenu dans les conditions suivantes

### **Conditions d'utilisation**

Température ambiante	+ 10 à + 40°C (+50 à +104°F)
Humidité relative	25 à 95% (non-condensée)
Pression atmosphérique	70 à 106 kPa

### **Conditions de transport et de stockage**

Température ambiante	- 20 à + 60°C (-4°F à +140°F)
Humidité relative	25 à 95% (non-condensée)
Pression atmosphérique	70 à 106 kPa

Dans toutes ces conditions l'air ambiant doit être sans pollution corrosive.

Ce dispositif est fait pièces électroniques et des piles. Ce qui veut dire qu'après la vie du matériel, ce dernier doit être recyclé selon la législation en vigueur.

A la demande de l'utilisateur le fabricant pourra fournir un manuel technique en anglais pour du personnel de maintenance qualifié, contenant toutes les informations nécessaires pour maintenir correctement et réparer le matériel.

# Déclaration de conformité fabricant à la compatibilité électromagnétique

## Electromagnetic emission tests

<u>Tests</u>	<u>Conformity</u>	<u>Electromagnetic environment</u>
CISPR 11 RF Disturbance	Group 1	ECG PC EOLYS Electrocardiograph is the equipment in which there is intentionally generated or used conductively coupled RF energy that is necessary for the internal functioning of the equipment itself.
CISPR 11 RF Disturbance	Class B	In household rooms the device can be the source of radio distortions. In such case please take appropriate actions.
IEC 61000-3-2 Harmonic Distortion	n.a.	
IEC 61000-3-3 Voltage Fluctuation and Flicker	n.a.	

## Electromagnetic immunity tests

<u>Tests</u>	<u>IEC 60601 Test level</u>	<u>Compatibility level</u>	<u>Electromagnetic Environment</u>
IEC 61000-4-2 Electrostatic Discharge	6kV – Contact Discharge Mode 8kV – Air Discharge Mode		The floor should be wood, concrete, or glazed. If there's an synthetic lining the relative humidity should be at least 30%
IEC 61000-4-4 Electrical Fast Transients	n.a.		
IEC 61000-4-5 Surges	n.a.		
IEC 61000-4-11 Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations	n.a.		
IEC 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Fields	n.a.		
IEC 61000-4-6 Conducted Disturbances	n.a.	n.a.	
IEC 61000-4-3 Radiated RF Electromagnetic Fields	3Vrms 80MHz to 2,5GHz	3V/m	

## ***Symboles d'usage***



Familiarize with user's manual



Date of made



Producer's address



CF type of application section – immune to defibrillation impulses



Appliance consists of electronic parts and battery cells. It should be disposed/recycled along the valid legal regulations

# Declaration of Conformity Déclaration de Conformité

Manufacturer: M4Medical Sp. z o.o.  
Fabricant : ul. St. Leszczyńskiego 60  
20-068 Lublin, Poland

*We declare under our sole responsibility that  
Nous déclarons sous notre entière responsabilité que*

the medical device: **Recorder**  
le dispositif médical : **Enregistreur**

models: **ECG PC EOLYS**  
modèle :

of class: **Ila, Rule X**  
de classe :

covered by the Technical Files rev. 1.02, dated 03.01.2014.  
est couvert par les fichiers techniques rev

*meets all provisions of the directive 93/42/EEC which apply to it.  
remplit toutes les obligations de la Directive 93/42/EEC qui s'appliquent à lui.*

Conformity assessment procedure:  
Procédure d'accréditation de conformité:  
Annex II of 93/42/EEC directive (chapter 4 of  
Annex II is not applicable)  
Annexe II de la directive 93/42/EEC (le chapitre 4  
de l'Annexe II est non applicable)

Batch numbers of products covered by this declaration can be found on the  
documentation of releasing of goods for sale: Form QA270211, to be considered as a  
part of this declaration.

Les numéros de lot des produits couverts par cette déclaration peuvent être trouvés  
dans la documentation de sortie des biens à vendre : Formulaire QA270211, pouvant  
être considéré comme partie de cette déclaration.

Notified Body:  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
90431 Nürnberg



Lublin 01.08.2015;

Company's Representative

M4MEDICAL Sp. z o.o.  
ul. St. Leszczyńskiego 60  
20-068 Lublin  
Miszczak

Note : *the device ECG PC EOLYS is exclusively manufactured for company  
EOLYS SAS, located 8 rue de la Grange 69009 LYON (France)*  
A noter : *le dispositif ECG PC EOLYS est fabriqué exclusivement pour la société  
EOLYS SAS, située au : 8 rue de la Grange 69009 LYON (France).*