

Otowave 102

MODE D'EMPLOI



**ERREUR ! UTILISEZ L'ONGLET ACCUEIL POUR APPLIQUER HEADING 1 AU TEXTE QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE APPARAÎTRE ICI.**

B. CONSIDERATIONS DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)

Les équipements médicaux électriques nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés et utilisés conformément aux informations relatives à la CEM fournies à la section 18. Elles fournissent des indications sur l'environnement électromagnétique dans lequel utiliser l'instrument.

Les équipements portables et mobiles de communications en radiofréquence (RF) peuvent affecter les équipements médicaux électriques. L'instrument ne doit pas être utilisé à côté de ou superposé à d'autres appareils ; si ceci est inévitable, il faudra s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument.

**ERREUR ! UTILISEZ L'ONGLET ACCUEIL POUR APPLIQUER HEADING 1 AU TEXTE QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE APPARAÎTRE ICI.**

B. BASE DE DONNÉES PLEINE

Un avertissement s'affiche si la base de données est pleine lors d'un essai d'enregistrement d'un test :

MÉMOIRE PLEINE ! 

GÉRER LES DONNÉES

SUPPRIMER LE PLUS ANCIEN

Annul.

La sélection de GÉRER LES DONNÉES affichera le menu de GESTION DES DONNÉES, qui permet d'imprimer les données ou de les transférer sur un ordinateur avant de supprimer les fichiers pour permettre d'enregistrer le nouveau test.

SUPPRIMER LE PLUS ANCIEN écrasera le plus ancien fichier présent dans la mémoire avec les nouveaux résultats.

Annuler retourne au menu précédent.

12. INFORMATIONS SYSTÈME

1	Variante :	Version de l'instrument (Tonalité double = option haute fréquence active)
2	Piles :	Informations sur le voltage
3	Dernier étal. :	Date du dernier étalonnage
4	Prochain étal. :	Prochaine date d'étalonnage
5	N° de série :	Numéro de série de l'Otowane
6	Ver. :	Version du micrologiciel
7	Date et heure :	Date et heure définies par l'utilisateur

**ERREUR ! UTILISEZ L'ONGLET ACCUEIL POUR APPLIQUER HEADING 1 AU TEXTE QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE APPARAÎTRE ICI.**

Si vous avez des problèmes pour résoudre les défaillances, consultez le distributeur de l'équipement (ou Amplivox si vous avez acheté l'appareil directement au fabricant).

**ERREUR ! UTILISEZ L'ONGLET ACCUEIL POUR APPLIQUER HEADING 1 AU TEXTE QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE APPARAÎTRE ICI.**

**ERREUR ! UTILISEZ L'ONGLET ACCUEIL POUR APPLIQUER HEADING 1 AU TEXTE QUE VOUS
SOUHAITEZ FAIRE APPARAÎTRE ICI.**

Copyright © 2022 Amplivox Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of Amplivox Ltd.