

# Amplivox PC850 - Audiomètre mixte (hors PC et sur PC)

Matériel idéal pour le dépistage en médecine préventive et en médecine d'aptitude. Fonctionnement autonome en mode manuel avec mémoire des tests, téléchargement sur un PC et pratique en direct sur un PC en mode automatique.



# Amplivox PC850 - Audiomètre mixte (hors PC et sur PC)

- \* Programme d'audiométrie très simple et très convivial sur PC
- \* Pratique également sur l'appareil seul en mode manuel simple
- \* Interface avec le logiciel médical (déjà faite ou facilement réalisable)

Audibase 5 non enregistré [ 111, DAVID BECKHAM, en 06/03/2003 ]

Éditer Paramétrage Édition Base de données Connexion Aide

Liste des patients Détails Audogrammes Questionnaire

Données historiques

Patient

N° de patient: 111 Adresse: 112 HIGH ST  
 Nom: BECKHAM ANY STREET  
 Prénom: DAVID ANY STREET  
 Poste: Engineer ANY COUNTRY  
 Service: research and development  
 Société: IMT  
 Localité: Bournemouth  
 Date de naissance: 12/06/1960  
 Sexe: Masculin Féminin  
 Statut: employé  
 Raison du départ: Ancienneté: 11 ans 6 mois

Test

Type de test: Manuel  
 Date du test: 06/03/2003  
 Heure du test: 09:32:22  
 Test précédent: 06/03/2003  
 Examineur:  
 N° série appareil: 30007  
 Calibré le: 12/03/2002  
 Date d'entrée: 01/01/1995  
 Date de rappel: 06/03/2005  
 Date de test de base: Test Audogram

Champ défini par l'utilisateur

F1:  
 F2:  
 F3:


Calculs

PAM= 47.5 (PAM(D)= 35, PAM(O)= 60) IPA= 58.3 (IPAD)= 45, IPA(O)= 71.7

Notes

Patient pour démonstration d'audiométrie avec PC850 et son logiciel Audibase 5.

Patients: 16 Enregistrements: 16 Filtre: Off Triés par:

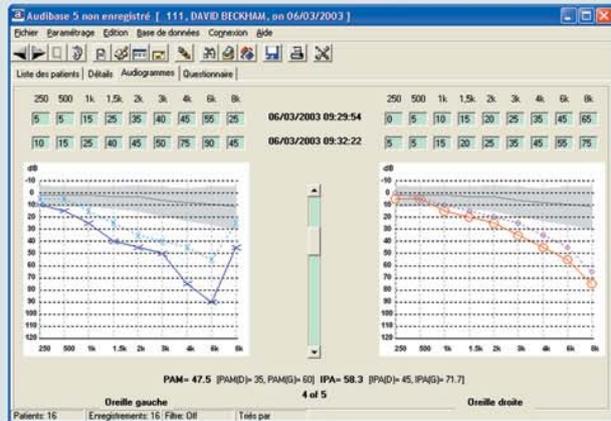

Amplivox Audibase 5 Enregistrement

N° de patient: 111 Adresse: 112 HIGH ST  
 Nom: BECKHAM ANY STREET  
 Prénom: DAVID ANY STREET  
 Poste: Engineer ANY COUNTRY  
 Service: research and development  
 Société: IMT  
 Localité: Bournemouth  
 DDI: 12/06/1960  
 Sexe: Male  
 Statut: employé  
 Raison du départ: Ancienneté: 11 ans 6 mois

Impression du titre du rapport

Type de test: manuel  
 Date du test: 06/03/2003  
 Durée du test: 09:40:50  
 Précédent: 06/03/2003  
 Examineur:  
 N° série appareil:  
 Calibré le: 12/03/2002  
 Date de rappel: 06/03/2005  
 Date de test de base:

F1: -  
 F2: -  
 F3: -

Calculs: MP42= 38.25 PAM= 65 (PAM(D)= 55, PAM(O)= 75) IPA= 79.2 (IPAD)= 71.7, IPA(O)= 89.7

Oreille gauche

Précédent: 10 15 25 40 45 50 75 90 45  
 En cours: 10 25 35 55 60 70 90 100 75

Oreille droite

Précédent: 5 5 15 20 25 35 45 55 75  
 En cours: 10 10 25 30 40 65 70 80 95

Notes: -

Audibase 5 non enregistré [ 111, DAVID BECKHAM, en 06/03/2003 ]

Éditer Paramétrage Édition Base de données Connexion Aide

Liste des patients Détails Audogrammes Questionnaire

Réponse	Question	Réponse
Oui	Vos parents proches (père, mère, sœur(s) ou frère(s) seulement) ont-ils déjà eu une perte auditive avant l'âge de 50 ans ?	
Oui	Avez-vous remarqué ou ressenti de récents changements dans votre audition ?	
Non	Avez-vous des problèmes à suivre une conversation normale ?	
Non	Tenez-vous de façon régulière une activité avec assez à feu, engin bruyant de BTP, aéroplane, moto ou machine à tisser de femme ?	
Non	Travaillez-vous actuellement dans un environnement bruyant qui requiert une protection auditive ?	
Non	Potiez-vous actuellement une protection auditive ?	
Non	Potiez-vous actuellement une protection auditive - des écouteurs ?	
Oui	Avez-vous fréquemment mal aux oreilles, des infections dans l'oreille, ou un drainage auriculaire ?	
Oui	Resentez-vous comme un sonnet dans l'oreille, un engourdissement du visage ou un vertige ?	
Oui	Avez-vous une cécité excessive dans l'oreille ?	
Non	Avez-vous eu une piqure de tympan ?	
Non	Avez-vous déjà subi un dommage suite à un choc, de tête ou d'oreille ?	
Non	Changez de l'oreille recommandée ou déjà effectuée ?	
Oui	Potiez-vous une prothèse auditive ?	
Oui	Avez-vous une tension artérielle élevée ?	
Oui	Avez-vous eu la rougeole, les oreillons, la varicelle, la scarlatine, la diphtérie ou une méningite ?	
Oui	Avez-vous été exposé à une explosion ou un coup de feu ?	
	Avez-vous fait l'expérience d'un environnement bruyant/service militaire ?	sometimes

Patients: 16 Enregistrements: 16 Filtre: Off Triés par:

Configuration

Backup/Réparation Config. Base de Données Questionnaire Analyse du test Connexion

Calculs

MP42

PAM

IPA

- \* Test live sur PC = test automatique (Bekesy ou Hughson & Westlake)
- \* Test en mode manuel sur l'audiomètre (déplacement hors centre fixe)
- \* Transfert d'examen manuels pratiqués hors PC ( 12 tests en mémoire)
- \* 2 fournitures du produit sont possibles :
  - complet avec base de données patient, calculs des indices, etc.
  - allégé pour interface à logiciel médical (prix allégé aussi ...)